


DiaExpert Uitleesprogramma (Pancares) CGM Monitoring Platform

-juli 2025-

Voorschrijver

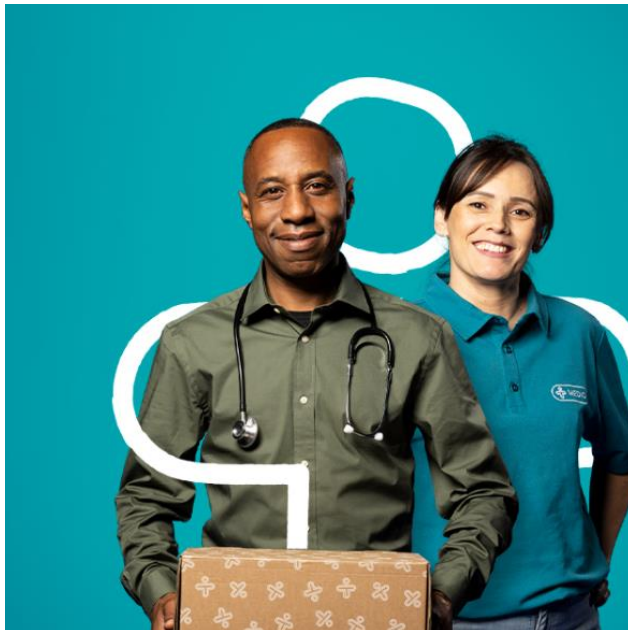

DiaExpert

LET OP:

Gebruik i.v.m. updates van het systeem
ALTIJD deze online versie van de
handleiding!

A screenshot of the DiaExpert login page. The header shows the DiaExpert and Pancares logos, with a language dropdown set to NL. The main content area features the text "DiaExpert – Uw partner in diabetesmanagement" and "Expertise. Samenwerking. In Beweging." On the right, there is a login form with fields for "E-mail" and "Wachtwoord", a "Login" button, and a "Wachtwoord vergeten" link. Below the login form is a "registreren" button.

DiaExpert Pancares NL

DiaExpert – Uw partner in diabetesmanagement

Expertise. Samenwerking. In Beweging.

Inloggen

E-mail

Wachtwoord

Login

Wachtwoord vergeten

registreren

DiaExpert Uitleesprogramma (Pancares)

Wat is het DiaExpert Uitleesprogramma?

Met het DiaExpert pancares platform kunnen diabetes-zorgprofessionals de **CGM-data** van hun patiënten die een DiaExpert sensor dragen, **op afstand** inzien en monitoren.

Het geeft de **realtime** / 'live' glucosewaarden, alsook een op maat te maken AGP-rapport (Ambulant Glucose Profile) over een **bepaalde periode**.

Het DiaExpert Uitleesprogramma is een zgn **web-based applicatie**, dus men hoeft geen programma op de computer te installeren.


diaexpert.pancares.com

Inhoud

- Voordat je begint
- Registratie & Inloggen
- Accountinstellingen
- Startpagina
- Nieuwe patiënt toevoegen
- Toestemming van de patiënt om data te delen
- Realtime weergave CGM gegevens
- AGP-rapporten op maat
- Patiënt verwijderen

Voordat je begint

- Open diaexpert.pancares.com
- Kies voor NL
- Laat Google jouw pagina **niet** nog een keer vertalen, dat hebben wij al voor je gedaan. (verschijnt er een pop up kies: X)

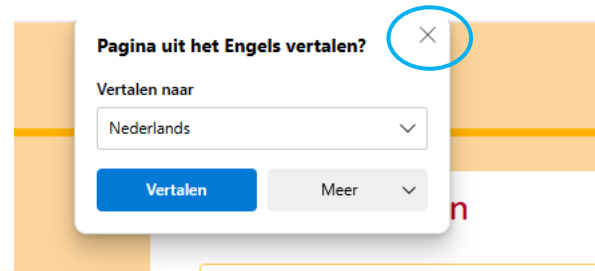

Registratie of inloggen

DiaExpert

Nog geen account? Maak een account aan via **REGISTREREN**

Wel al een account: Log in met emailadres en wachtwoord

DiaExpert **Pancarex** NL ▾

DiaExpert – Uw partner in diabetesmanagement

Expertise. Samenwerking. In Beweging.

Inloggen

E-mail

Wachtwoord

Login

[Wachtwoord vergeten](#)

registreren

Registreren nieuw account

drie simpele stappen

DiaExpert

1. Aanmelden

:Stap één > Stap twee > Stap drie

Accountgegevens



* Voornaam
Voornaam

Geslacht
Geslacht

* Land
Land

< Terug

2. Aanmelden

:Stap één > Stap twee > Stap drie

Instelling

* Glucose-eenheid
☒ mmol/L ☐ mg/dL

Hoge en lage drempel van BG

* Hoog 13.3 mmol/L

* Laag 3.9 mmol/L

< Terug

Volgende >

3. Aanmelden

:Stap één > Stap twee > Stap drie

* E-mailadres
E-mail

* Verificatiecode
Verificatiecode

* Nieuw wachtwoord
Nieuw wachtwoord

* Bevestig wachtwoord
Bevestig wachtwoord

< Terug


Volgende >

Let op!
glucose eenheid
instellen op
mmol

Verificatiecode via
E-mail controleer
evt de SPAM

Account-instellingen (1)

DiaExpert

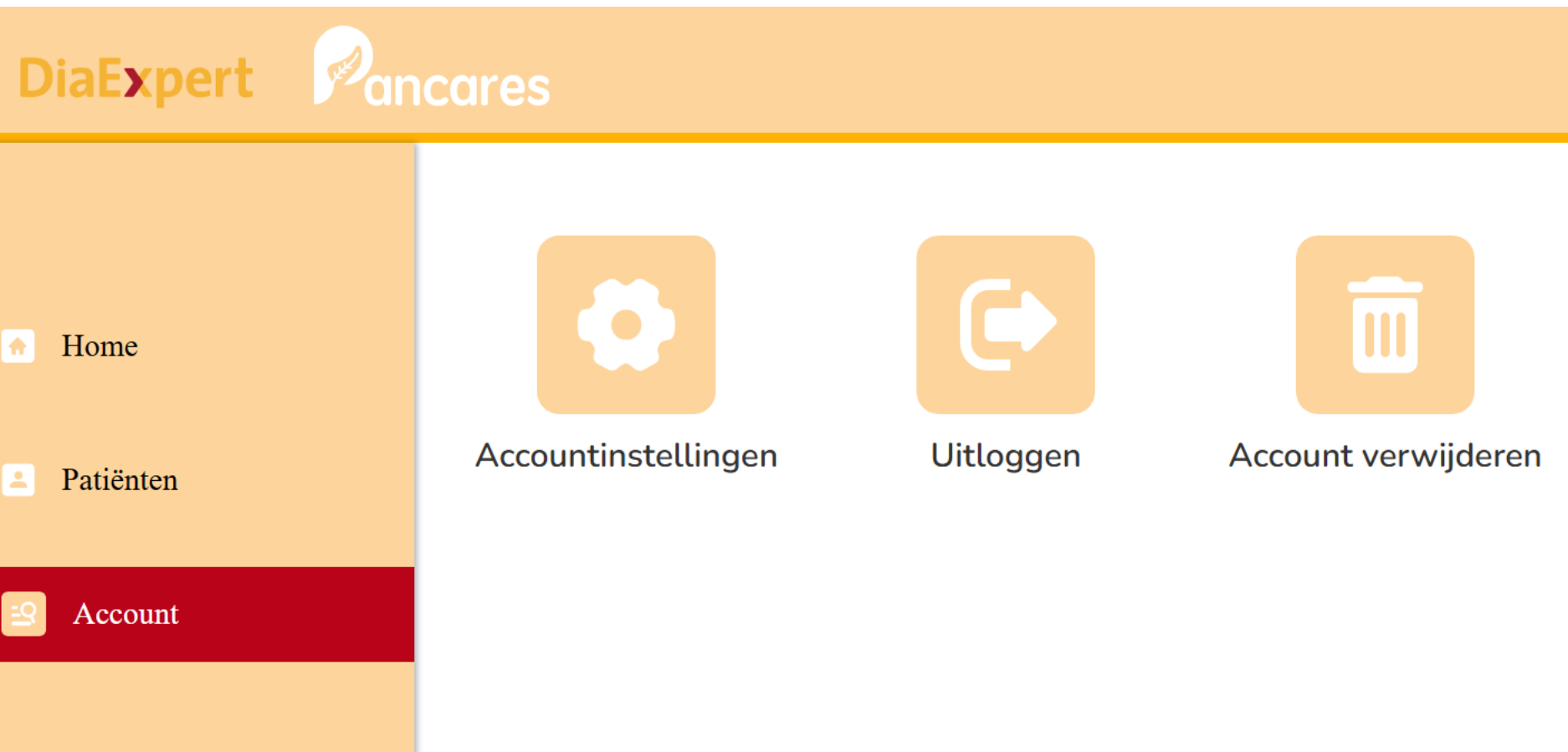

Hier staat nu nog een QR-code. Deze kun je negeren.

Account-instellingen (2)

DiaExpert

DiaExpert

ancares

NL ▾

Startpagina

Patiënten

Account

Hetty de Vries

Account

Instellingen

* Voornaam

Hetty

* Achternaam

de Vries

* Land

31 NL Nederland ▾

Titel

Titel

Wachtwoord wijzigen

Bevestigen

Startpagina

DiaExpert

DiaExpert

ancares

NL ▾

Dr

Home

Patiënten

Account

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
Naam zorgverlener

Realtime CGM's 06/11

Geen realtime gegevens in de afgelopen 30 minuten

Meer...

Rapport overzicht

2025/05/28 - 2025/06/04		AGP*
2025/05/27 - 2025/06/03		AGP*
2025/05/21 - 2025/05/28		AGP*
2025/05/08 - 2025/05/15		AGP*

Meer...

Overzicht van 'live' (realtime)
data van patiënten met sensor

Overzicht van meest recent
gegenereerde rapporten

Nieuwe patiënt toevoegen

DiaExpert

NL  

 Home

 **Patiënten**

 Account

Patiëntenlijst

+Nieuwe patiënt toevoegen

Filtervoorwaarde

Patiënten-ID/naam/Zorgverlene

Zoekopdracht

	ID	Naam	Geboortedatum	Diabetestype
☆	283884		2000/05/27	
☆	503885		2019/06/25	
☆	196186		2005/05/10	
☆	654774		2025/03/12	Type 2
☆	813153		2011/03/22	Type 1

Let op! Altijd eerst patiënt aanmaken, dan pas data linken / uitnodigen

Let op!
Patiënt moet eerst de DiaExpert App downloaden en een account aanmaken.

Nieuwe patiënt toevoegen

*** Voornaam**

Voornaam

*** Achternaam**

Achternaam

Geslacht

Geslacht ▾

*** Geboortedatum** Geboortedatum**Type diabetes**

Type diabetes ▾

Andere ziekten

Andere ziekten ▾

Complicaties

Complicaties ▾

Therapietype

Therapietype ▾

Lengte

Lengte

cm

Gewicht

Gewicht

kg

BMI

BMI

Registered email address

Registered email address

Creëren

Toestemming van de patiënt om de CGM data op afstand in te zien

③

DiaExpert ancares NL ▾

← Demo patient Tester

Persoonlijk profiel **CGM-monitoring** Bezoek Memo

Rapport gegenereerde periode: 2025/07/03 — 2025/07/10 [Rapport overzicht](#)

07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10

AGP

Selecteer periode

Periode selecteren 7 dagen 14 dagen 30 dagen 90 dagen

*Meest recente dag OF

2025-07-03 - 2025-07-10

Startpagina

Patiënten

Account

④

CGMs App-account

←

Patiënt-ID: 457575

Naam van de patiënt: Demo patient Tester

Voer app-account in

⑤

CGMs App-account

←

Patiënt-ID: 457575

Voer app-account in

Uitnodiging verzenden

1. Let op dat je eerst de patiënt hebt aangemaakt (zie vorige slide)
2. Ga vanuit patiënt overview naar de specifieke patiënt
3. Klik op CGM-monitoring
4. Klik op 'Voer app-account in'
5. Voer e-mail adres van de patiënt in (let op! Gebruik het e-mail adres waarmee de patiënt een account aangemaakt heeft in de DiaExpert app)
6. De patiënt ontvangt een e-mail met instructies (zie volgende slide)

Komt binnenkort: QR-code die de patiënt direct kan scannen.
(komt in update van deze hand-out)

Toestemming van de patiënt om de CGM data op afstand in te zien

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: noreply@sender.microtechmd.com

Datum: 04-07-2025 14:41 (GMT+01:00)

Aan: XXX

Onderwerp: Pancares

De heer / mevrouw Dr Hetty de Vries wil uw CGM data kunnen inzien.


Als u hiermee akkoord bent, accepteer dan de uitnodiging in uw DiaExpert CGM app.

Ga naar uw Account (icoontje rechtsboven op de homepage, dan "Machtigingsbeheer", dan "Deel met Pancares Account" en accepteer de uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

DiaExpert Pancares Diabetes Management Team

1. Patiënt ontvangt mail met onderwerp Pancares. Evt: check spam / ongewenste email.
2. In deze mail staan heldere instructies.

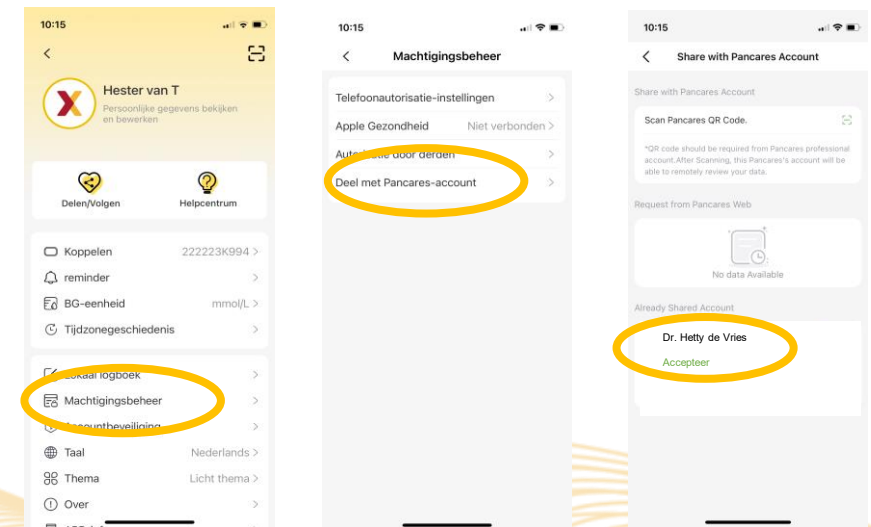

Real-time CGM Monitoring

DiaExpert

DiaExpert

ancares

NL ▾

Dr

Home

Patiënten

Account

Realtime CGM's 06/11

Rapport overzicht

DiaExpert

ancares

NL ▾

Xxx xxxxxxx

Realtime CGM-bewaking

[CGMs App-account](#) [New Request](#)

Filtervoorwaarde

Zoekopdracht

Waarschuwingdrempel

☒ Gevolgd door de app-instelling van Patient ☐ Vast

Lage BG — Hoge BG mmol/L


Monitoringlijst—06/11/2025

ID	Naam	CGM-metingen	Tijd	Serienummer	Apparaatspecificaties	Boven vastzetten
196186	Lisa Schutte	6mmol/L	17:01		DiaExpert	
503885	Michaela Hegner	7.2mmol/L	17:01		DiaExpert	
813153	Patient Hester v	5.4mmol/L	08:47		DiaExpert	

Real-time CGM Monitoring



Rapportperiode zelf
aan te passen

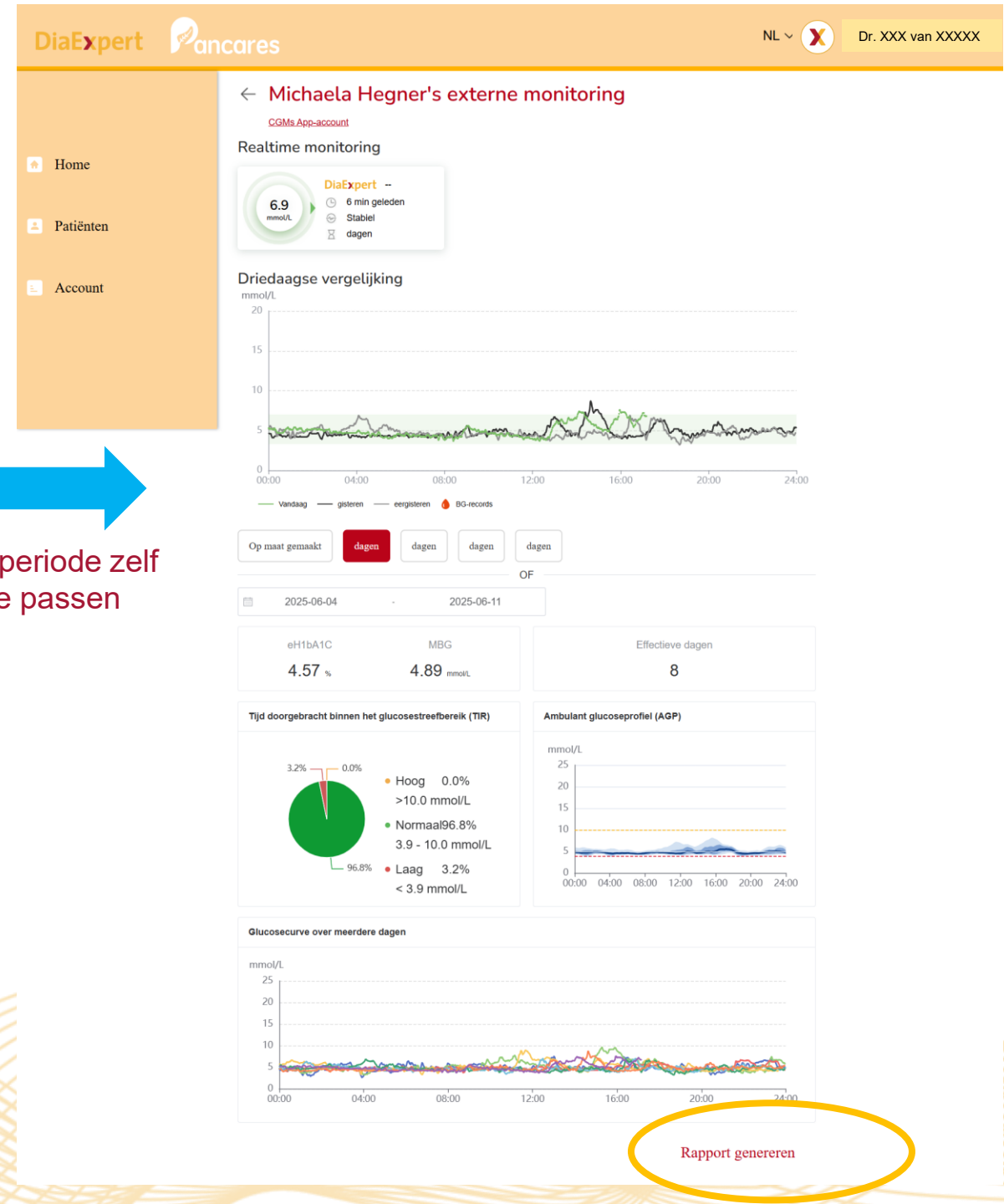

CGM of AGP Rapport

DiaExpert

CGM Report

Basic Information


Name: [REDACTED]
Type of [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Gender: Zij
Height: --
Serial Number: --


Age: 5
Weight: --

CGM Standardized Report Core Parameters


Item	Unit	Results	Reference Value
CGM Assessment Days	day	9	> 14
CGM Coverage Time	%	85.86	> 70
GMI	%	4.57	< 7
MBG	mmol/L	4.89	4.3 - 6.6
GV (CV%)	%	16.69	≤ 36

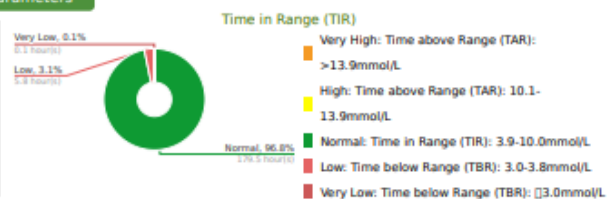

AGP Map

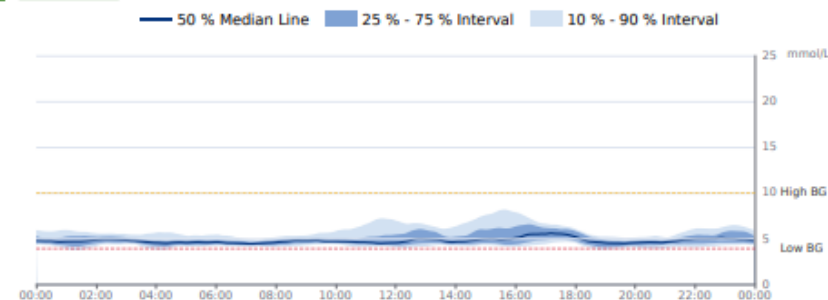

Multi-day BG Curves


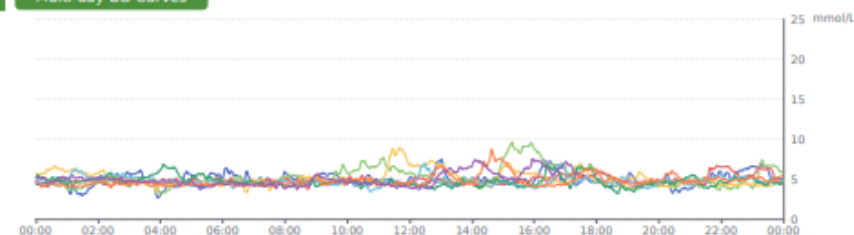


High/Low BG Events

	< 2.8 mmol/L	< 3.3 mmol/L	< 3.9 mmol/L	> 10 mmol/L	> 13.9 mmol/L	> 22.2 mmol/L
Avg Hours Per Day (Hours)	0	0.1	0.8	0	0	0
Ave Events Per Day	0	0	0	0	0	0
Ave Duration Per Day (Hours)	0.42	0.73	0.79	0	0	0

Measurements in the hypoglycemic (low blood sugar) range for at least 10 minutes straight

Daily BG Curve

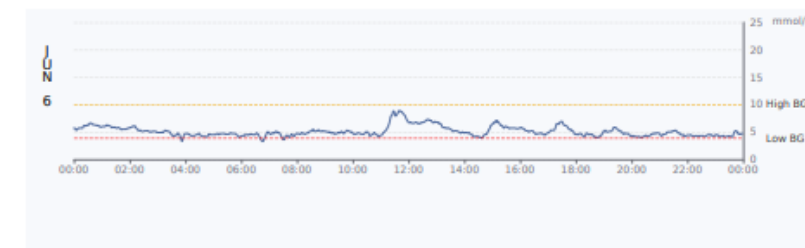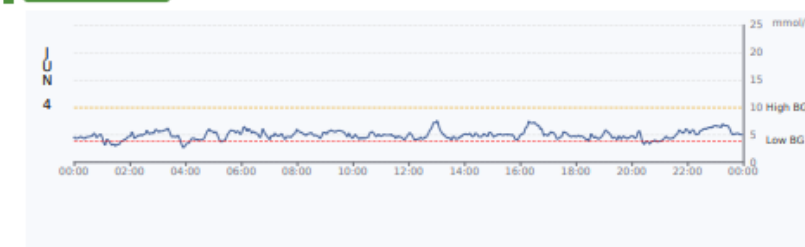

Overzicht van AGP-rapporten per patiënt

DiaExpert

Pancare

NL ▾

Home

Patiënten

Account

←

Naam Patiënt

Personal Profile

CGM-bewaking

Bezoek Memo

Rapport gegenereerde periode: 2025/06/04 — 2025/06/11 [Rapport overzicht](#)

06-04

06-05

06-06

06-07

06-08

06-09

06-10

06-11

AGP

Selecteer tijd

Op maat gemaakt

dagen

dagen

dagen

dagen

*Meest recente dag

2025-06-04

-

2025-06-11

←

Rapport van

Patiënt Naam Patiënt van T

Filtervoorwaarde

Gegenereerde tijd:

2025-05-12

-

2025-06-11

Zoekopdracht

Gegenereerde tijd	Rapportperiode
15:03 06/03/2025	05/27/2025 - 06/03/2025
07:59 05/29/2025	05/21/2025 - 05/28/2025
14:22 05/13/2025	05/06/2025 - 05/13/2025

Patiënt verwijderen

1. ← Marjo van M

Persoonlijk profiel

CGM-monitoring

Bezoek Memo

Rapport gegenereerde periode: 2025/07/01 — 2025/07/08 [Rapport overzicht](#)

07-01	07-02	07-03	07-04	07-05	07-06	07-07	07-08
AGP							

Selecteer periode

Periode selecteren

7 dagen

14 dagen

30 dagen

90 dagen

*Meest recente dag

OF

2025-07-01

-

2025-07-08

Type diabetes:Type 1

Therapietype:Insuline-injectie

Complicaties:Ander

Andere ziekten:Geen

Registered email address:

BMI:

2.

DeleteEdit

Vragen?

DiaExpertNL@mediq.com