

Infuспаalklemadapter

Voor gebruik in combinatie met CADD®-Solis infusiepompen

Gebruiksaanwijzing

Opmerkingen

- Lees de aanwijzingen geheel alvorens de infuспаalklemadapter aan te sluiten of los te maken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
 - Raadpleeg de bijgeleverde Gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies, waarschuwingen, specificaties, reinigingsadviezen en aanvullende informatie met betrekking tot het bedienen van de CADD®-Solis pomp.
-

Inhoudsopgave

Symbolen	2
De CADD®-Solis Infuuspaalklemadapter	3
De infuuspaalklemadapter aan de pomp bevestigen	4
Het gebruik van de infuuspaalklemadapter	7
De infuuspaalklemadapter van de pomp losmaken	9
Problemen oplossen	10

Symbolen



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Catalogusnummer



Batchcode



Gemachtigde in de Europese Gemeenschap



Gemachtigde voor Australië



Temperatuurlimiet



Vochtigheidslimieten




Atmosferische druklimieten

De CADD®-Solis Infuuspaalklemadapter


Door bevestiging van de CADD®-Solis infuuspaalklemadapter aan de achterkant van de CADD®-Solis ambulante infusiepomp kunt u de pomp aan een infuusstatief bevestigen (op het infuusstatief moet dan de CADD®- infuuspaalklem gemonteerd zijn).

De infuuspaalklemadapter bestaat uit twee onderdelen, de basisplaat en de draaiplaat. Bij het monteren van de adapter op de pomp worden deze twee onderdelen tegen elkaar vastgeklikt.

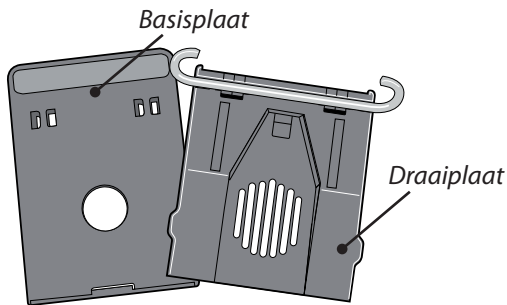


De infuuspaalklemadapter aan de pomp bevestigen


1. Als de basisplaat en de draaiplaat niet aan elkaar zijn bevestigd, moet dat eerst gebeuren. Breng de delen in lijn met elkaar, houd ze in die positie en klik ze dan aan elkaar vast, volgens de onderstaande afbeeldingen. De linker- en rechterbovenkanten moeten op elkaar worden vastgeklikt.

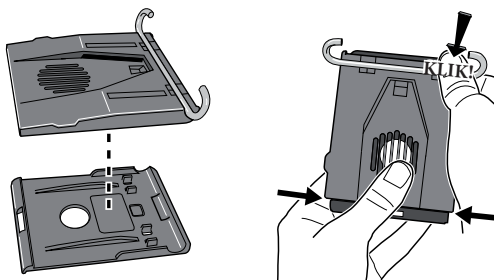


2. Draai de bevestigingshaken die zich op de draaiplaat bevindt tot een hoek van ca. 90 graden (rechts).

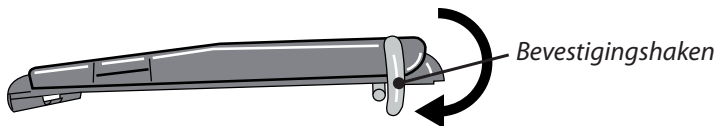


3. Plaats de infuспаalklemadapter op de bevestigingshaken sleuf; zie afbeelding.

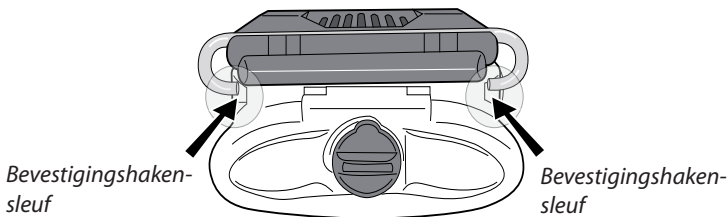



4. Plaats uw beide duimen bovenop de infuспаalklemadapter, zoals afgebeeld, en duw de adapter omlaag totdat hij niet verder kan.

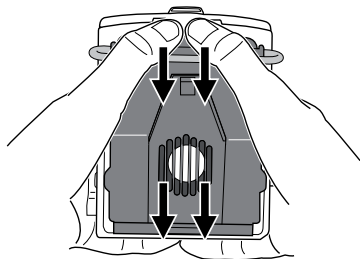

De onderkant van de infuuspalklemadapter moet de onderkant van de pomp bedekken.

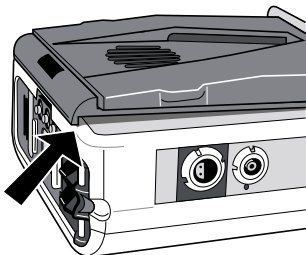


5. Plaats beide duimen tegen de onderkant van de infuuspalklemadapter, net onder de sleuven. Duw de adapter stevig omlaag. Daarmee wordt de infuuspalklemadapter aan de pomp bevestigd. U hoort een duidelijke klik als de adapter stevig is aangesloten.

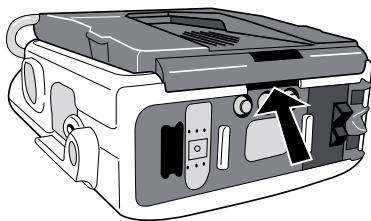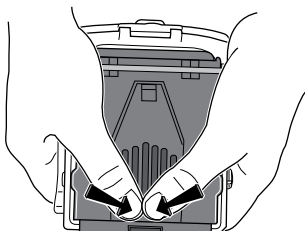



Het gebruik van de infuспаalkklemadapter

1. Bevestig de CADD®-infuспаalkklem aan een infuспаalfit conform de bij de adapter geleverde instructies.
2. Schuif de infuспаalkklemadapter op de CADD®-infuспаalkklem totdat de adapter vastklikt. De adapter zit nu op zijn plaats gefixeerd.

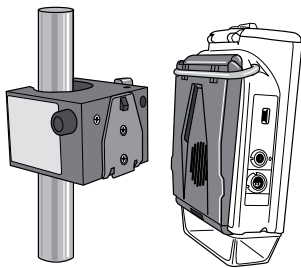

3. Om de pomp van de infuспаalkklem los te maken moet u op de knop aan de zijkant van de beugel drukken en de pomp oplichten.

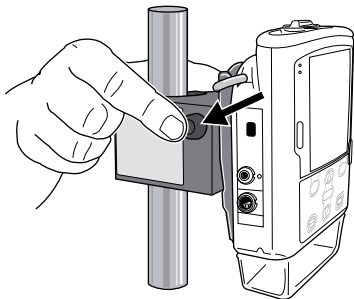

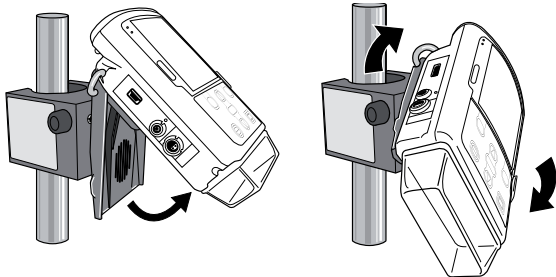



OPMERKING: Als de infuспаalklemadapter aan de infuспаalklem is bevestigd, kunt u de pomp kantelen om het zicht op de display te vergemakkelijken. Als het draaivlak (REF 21-2183-51) op de adapter is aangebracht, kunt u de pomp ook 230 graden roteren om het zicht op de display te verbeteren. Zie de afzonderlijke instructies voor de werking, het aanbrengen en het verwijderen van het draaivlak.

Het draaivlak is een optionele accessoire. Het kan niet in combinatie met een LockBox worden gebruikt.

De infuuspalklemadapter van de pomp losmaken

Voor het losmaken van de infuuspalklemadapter van de pomp hebt u een grote schroevendraaier met vlakke kop nodig.

1. Kantel de draaiplaat omhoog zodat de lipjes zichtbaar worden.
2. Schuif de bladpunt van een grote schroevendraaier met vlakke kop recht vooruit onder het lipje en wrik het lipje omhoog (A). Als u een kleine schroevendraaier gebruikt, kan het nodig zijn de schroevendraaier te roteren om het lipje uit de sleuf te wrikken (B).

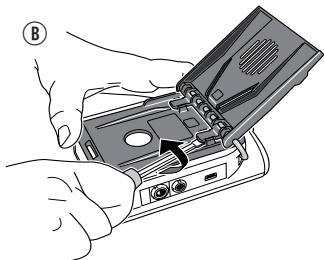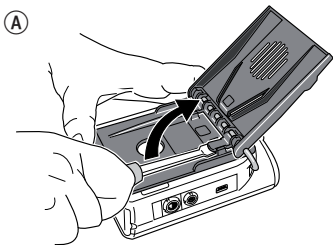

3. Herhaal deze handelingen met het tweede lipje.
4. Maak de infuuspalklemadapter los van de pomp.


Problemen oplossen

Ik kan de infuuspalklemadapter niet aan de pomp bevestigd krijgen.

Zorg dat de draaiplaat en de basisplaat stevig op elkaar zijn bevestigd en dat de bevestigingshaken in de juiste hoek is gepositioneerd. Als het optionele draaivlak is aangebracht, moet de opening van het draaivlak ten opzichte van de pomp buitenwaarts zijn gericht.

Ik heb de draaiplaat te ver naar achteren gekanteld en hij is daardoor van de bevestigingshaken losgeraakt.

Dit kan alleen gebeuren als de infuuspalklemadapter aan de pomp is bevestigd, maar niet aan een infuusstatief. Dit is eenvoudig op te lossen. Stel de draaiplaat in positie boven de bevestigingshaken en klap de hoeken terug onder de haken. Sluit vervolgens de draaiplaat, zodat hij in positie vastklikt.

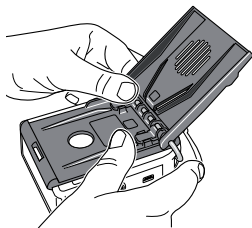

Ik kan de lipjes van de draaiplaat niet van de basisplaat loskrijgen.

De gemakkelijkste methode om de lipjes los te maken is een grote schroevendraaier als hefboom te gebruiken (recht omhoog duwen). Als u een kleine schroevendraaier gebruikt, moet u de schroevendraaier langzaam overlans draaien totdat de lipjes uit de basisplaat zijn gewrongen. Daarna kunt u de lipjes uit de sleuf nemen.

CADDTM

Smiths Medical MD, Inc.

St. Paul, MN 55112 USA

1 651 633.2556

www.smiths-medical.com

EC REP

Smiths Medical International Ltd.

WD24 4LG, UK

+44 (0) 1923 246434



CADD-Solis, het CADD-logo en het Smiths Medical-logo zijn handelsmerken van de Smiths Medical bedrijvenfamilie. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk bij het Amerikaanse patenten- en handelsmerkenkantoor en in bepaalde andere landen gedeponneerd is. Patenten in de V.S. en elders aangevraagd.

Alle andere genoemde namen en merken zijn de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de respectieve eigenaren.

© 2009 Smiths Medical bedrijvenfamilie. Alle rechten voorbehouden.

2009-06

40-5704-06C-EN

smiths medical