

# Klinische informatie

Easyflow® is vooraf ingesteld op een **gemiddelde inloopsnelheid**, gebaseerd op het gebruik van **5% glucose** als verdunningsvloeistof voor optimale viscositeit.

Bij gebruik van een **0,9% natriumchloride-oplossing** kan de stroomsnelheid ongeveer **10% hoger** uitvallen.

De pomp is gekalibreerd bij **kamertemperatuur (24°C ±2°C)** en een temperatuur van **32°C (±2°C)** ter hoogte van de flow restrictor (lichaamstemperatuur).

## Tijd om kamertemperatuur te bereiken (circa +24°C)

|                                              | 60 ML POMPEN | 100 ML POMPEN | 300 ML POMPEN | 500 ML POMPEN |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| UREN UIT DE KOELKAST (CIRCA +2 °C TOT +6 °C) | CIRCA 4 UUR  | CIRCA 5 UUR   | CIRCA 6 UUR   | CIRCA 8 UUR   |
| UREN UIT VRIEZER (CIRCA -15 °C)              | CIRCA 6 UUR  | CIRCA 7 UUR   | CIRCA 9 UUR   | CIRCA 11 UUR  |

Bij gebruik van cytotoxische geneesmiddelen wordt aanbevolen de infusielijn vooraf te vullen en te primen met een kleine hoeveelheid infuusvloeistof. Dit vermindert het risico op neerslag en zorgt ervoor dat het

geneesmiddel pas in de lijn komt bij de start van de infusie.

Op onze webpagina vindt u praktische informatie en richtlijnen over stabiliteit bij het gebruik van elastomeerpompen.



Scan de QR-code om onze website te bezoeken.

# Productspecificaties

De Mediq Easyflow® Elastomeerpomp is verkrijgbaar in verschillende maten en infusiesnelheden.

| INLOOP-SNELHEID | CODE MEDIQ | CODE MEDIQ CS (AUTOSTOP) | CODE LEVERANCIER | 60 ML         |              |                |  | KLEUR | STUKS/DOOS |
|-----------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|--|-------|------------|
|                 |            |                          |                  | NOMINAAL VOL. | INFUSIE-TIJD | MIN./MAX. VOL. |  |       |            |
| 0,5 ml/u        | 3071303    | 3073214                  | MF0050*          | 40-60 ML      | 4/5 DAGEN    | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 1,0 ml/u        | 3071307    | 3073191                  | MF0100*          | 48 ML         | 2 DAGEN      | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 1,5 ml/u        | 3071308    | 3073216                  | MF0150*          | 54 ML         | 1,5 DAG      | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 2,0 ml/u        | 3071309    | 3073217                  | MF0200*          | 48 ML         | 1 DAG        | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 2,5 ml/u        | 3071312    | 3073218                  | MF0250*          | 60 ML         | 1 DAG        | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 3,0 ml/u        | 3071313    | 3073219                  | MF0300*          | 60 ML         | 20 UUR       | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 4,0 ml/u        | 3071314    | 3073220                  | MF0400*          | 60 ML         | 15 UUR       | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 5,0 ml/u        | 3071315    | 3073221                  | MF0500*          | 60 ML         | 12 UUR       | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 7,0 ml/u        | 3071316    | 3073222                  | MF0700*          | 56 ML         | 8 UUR        | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 8,0 ml/u        | 3071317    | 3073223                  | MF0800*          | 48 ML         | 6 UUR        | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 10,0 ml/u       | 3071318    | 3073224                  | MF1000*          | 60 ML         | 6 UUR        | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 15,0 ml/u       | 3071319    | 3073225                  | MF1500*          | 60 ML         | 4 UUR        | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 30,0 ml/u       | 3071329    | 3073226                  | MF3000*          | 60 ML         | 2 UUR        | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 60,0 ml/u       | 3071334    | 3073227                  | MF6000*          | 60 ML         | 1 UUR        | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |
| 120,0 ml/u      | 3071335    | 3073228                  | MF1200*          | 60 ML         | 30 MIN.      | 48 - 72 ML     |  |       | 30 STUKS   |

| INLOOP-SNELHEID | CODE MEDIQ | CODE MEDIQ CS (AUTOSTOP) | CODE LEVERANCIER | 100 ML        |             |                |  | KLEUR | STUKS/DOOS |
|-----------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|--|-------|------------|
|                 |            |                          |                  | NOMINAAL VOL. | INFUSIETIJD | MIN./MAX. VOL. |  |       |            |
| 0,5 ml/u        | 3071336    | 3073170                  | LF0050*          | 84 ML         | 7 DAGEN     | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 1,0 ml/u        | 3071337    | 3073171                  | LF0100*          | 96-120 ML     | 4/5 DAGEN   | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 1,5 ml/u        | 3071338    | 3073172                  | LF0150*          | 108 ML        | 3 DAGEN     | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 2,0 ml/u        | 3071339    | 3073173                  | LF0200*          | 96 ML         | 2 DAGEN     | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 2,5 ml/u        | 3071340    | 3073174                  | LF0250*          | 120 ML        | 2 DAGEN     | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 3,0 ml/u        | 3071341    | 3073175                  | LF0300*          | 108 ML        | 1,5 DAG     | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 4,0 ml/u        | 3071342    | 3073176                  | LF0400*          | 96 ML         | 1 DAG       | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 5,0 ml/u        | 3071350    | 3073177                  | LF0500*          | 120 ML        | 1 DAG       | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 7,0 ml/u        | 3071351    | 3073178                  | LF0700*          | 98 ML         | 14 UUR      | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 8,0 ml/u        | 3071352    | 3073179                  | LF0800*          | 96 ML         | 12 UUR      | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 10,0 ml/u       | 3071353    | 3073180                  | LF1000*          | 120 ML        | 12 UUR      | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 15,0 ml/u       | 3071354    | 3073181                  | LF1500*          | 120 ML        | 8 UUR       | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 20,0 ml/u       | 3071355    | 3073182                  | LF2000*          | 120 ML        | 6 UUR       | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 50,0 ml/u       | 3071356    | 3073183                  | LF3000*          | 100 ML        | 2 UUR       | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 100,0 ml/u      | 3071357    | 3073184                  | LF6000*          | 100 ML        | 1 UUR       | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |
| 200,0 ml/u      | 3071358    | 3073185                  | LF1200*          | 100 ML        | 30 MIN.     | 80 - 120 ML    |  |       | 30 STUKS   |

\* Voeg CS toe aan het einde van de code voor de variant met autostop

| INLOOP-SNELHEID | CODE MEDIQ | CODE MEDIQ CS (AUTOSTOP) | CODE LEVERANCIER | 300 ML        |             |                |  | KLEUR | STUKS/DOOS |
|-----------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|--|-------|------------|
|                 |            |                          |                  | NOMINAAL VOL. | INFUSIETIJD | MIN./MAX. VOL. |  |       |            |
| 0,5 ml/u        | 3071359    | 3073162                  | BF0050*          | 300 ML        | 25 DAGEN    | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 1,0 ml/u        | 3071361    | 3073163                  | BF0100*          | 288 ML        | 12 DAGEN    | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 1,5 ml/u        | 3071362    | 3073164                  | BF0150*          | 252 ML        | 7 DAGEN     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 2,0 ml/u        | 3071363    | 3073165                  | BF0200*          | 240 ML        | 5 DAGEN     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 2,5 ml/u        | 3071364    | 3073166                  | BF0250*          | 300 ML        | 5 DAGEN     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 3,0 ml/u        | 3071360    | 3073167                  | BF0300*          | 288 ML        | 4 DAGEN     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 4,0 ml/u        | 3071365    | 3073168                  | BF0400*          | 288 ML        | 3 DAGEN     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 5,0 ml/u        | 3071366    | 3073169                  | BF0500*          | 240 ML        | 2 DAGEN     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 7,0 ml/u        | 3071367    | 3073200                  | BF0700*          | 252 ML        | 1,5 DAG     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 8,0 ml/u        | 3071368    | 3073201                  | BF0800*          | 288 ML        | 1,5 DAG     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 10,0 ml/u       | 3071370    | 3073202                  | BF1000*          | 240 ML        | 1 DAG       | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 15,0 ml/u       | 3071371    | 3073203                  | BF1500*          | 360 ML        | 1 DAG       | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 50,0 ml/u       | 3071372    | 3073204                  | BF3000*          | 300 ML        | 6 UUR       | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 300,0 ml/u      | 3071373    | 3073205                  | BF6000*          | 300 ML        | 1 UUR       | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 600,0 ml/u      | 3071374    | 3073206                  | BF1200*          | 300 ML        | 30 MIN.     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |

| INLOOP-SNELHEID | CODE MEDIQ | CODE MEDIQ CS (AUTOSTOP) | CODE LEVERANCIER | 500 ML        |             |                |  | KLEUR | STUKS/DOOS |
|-----------------|------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|--|-------|------------|
|                 |            |                          |                  | NOMINAAL VOL. | INFUSIETIJD | MIN./MAX. VOL. |  |       |            |
| 250 ml/u        | 3071375    | 3073186                  | BM004*           | 500 ML        | 2 UUR       | 480 - 520 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 41,6 ml/u       | 3071380    | 3073187                  | BM005*           | 500 ML        | 12 UUR      | 480 - 520 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 20,8 ml/u       | 3071381    | 3073188                  | BM006*           | 500 ML        | 1 DAG       | 480 - 520 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 200 ml/u        | 3071455    | 3073189                  | BM007*           | 300 ML        | 1,5 UUR     | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 20,8 ml/u       | 3071456    | 3073190                  | BM008*           | 250 ML        | 12 UUR      | 180 - 360 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 100 ml/u        | 3071457    | 3073191                  | BM009*           | 400 ML        | 4 UUR       | 480 - 520 ML   |  |       | 20 STUKS   |
| 500 ml/u        | 3071458    | 3073192                  | BM010*           | 500 ML        | 1 UUR       | 480 - 520 ML   |  |       | 20 STUKS   |

| STARTPAKKET          | TOEDIENINGSWEG                          | BESTELCODE MEDIQ |
|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ELASTOMEER PAC       | PORT-A-CATH                             | 2003052          |
| ELASTOMEER PICC      | PERIFEEER INGEBRACHTE CENTRALE KATHETER | 2003053          |
| ELASTOMEER CVC       | CENTRAAL VENEUZE KATHETER               | 2003054          |
| ELASTOMEER PERIFEEER | PERIFEEER INFUSUS                       | 2003055          |
| ELASTOMEER MIDLINE   | PERIFERE INTRAVENEUZE KATHETER          | 2003401          |

easyflow®  
elastomeerpomp

Apotheek

Easyflow®  
Elastomeerpomp



at the heart of healthcare



# Productbeschrijving

De Mediq Easyflow® Elastomeerpomp is de kleinste, draagbare en lichtgewicht elastomeerpomp voor continue infusie.

Het unieke, volledig zachte ontwerp maakt deze pomp tot de enige in zijn soort op de wereldmarkt, gemaakt van UV-bestendig, DEHP- en latexvrij materiaal, conform ISO 28620 norm voor elastomeerpompen.

Dit zorgt voor een uitzonderlijk hoog niveau van comfort voor de patiënt.

De pomp bestaat uit een elastomeer ballon in een transparante, UV-bestendige zachte behuizing, een infusielijn met capillair buisje als flowrestrictor, en een Luer Lock-connector voor aansluiting op het toegangssysteem van de patiënt.

Zodra de ballon is gevuld, zorgt het elastomeermembraan door middel van positieve druk voor een constante medicijntoediening. De flowrate wordt bepaald door de combinatie van dit membraan en de flowrestrictor.



## Exclusief verkrijgbaar bij Mediq

**Gepatenteerd en praktisch ontwerp**  
Draagbaar, licht, veilig en zelfstandig werkend. Ideaal voor gebruik in klinische en thuissituaties.

**Gelijkmatige medicatietoediening**  
Zorgt voor een constante afgifte.

**100% individuele kwaliteitscontrole**  
Voor maximale veiligheid bij elke toepassing.

**Innovatieve autostop**  
Verhoogt de veiligheid en is geschikt voor zelfstandig gebruik.

**Eenvoudige duidelijke labeling**  
Ondersteunt zelfstandig en veilig gebruik.

## Ondersteunt de volgende indicaties

- Chemotherapie
- Acute en chronische pijnmanagement
- Antibiotica en antivirale therapy
- Hydratie

**Toegangswegen waar de Easyflow® bij gebruikt kan worden**  
PICC, PAC, CVC, Midline, perifere, subcutaan.

# De onderdelen toegelicht

**Verwijderbare klem**  
Alleen gebruiken tussen de vulpoort en het filter.

**Vulpoort**  
Anti-terugstroming, met zelfsluitend naadloos toegangsventiel.

**Aansluitpunt met Luer-lock**  
Voor aansluiting op het toegangssysteem van de patiënt. Hydrofobe dop voor automatische ontluchting en om medicatielekage te voorkomen tijdens het vullen van de pomp.

**Pomphuis**  
Zachte behuizing met alle identificatiegegevens van het apparaat. Bescherm het elastomeerreservoir. UV-bestendig.

**Elastomeer reservoir**  
UV-bestendig, reservoir voor de infuusvloeistof/bereide medicatie.

**Indicator**  
Voor het monitoren van de voortgang van de infusie.

**Beschikbaar met een standaard dop of met een Autostop.**  
De Autostop vervangt het blauwe dopje na het primen van de infuuspomp en creëert een gesloten systeem voor meer veiligheid.

Voorkomt lekkage bij aan- en afsluiten. Vloeistof stroomt pas na aansluiting op de toedieningsweg. Direct te koppelen aan een naadloze connector.

Extra hulpmiddelen o.a.:

- Hardcases (harde beschermkoker)
- Handig tasje

**Filter**  
Voor het tegenhouden van deeltjes en bacteriën en het afvoeren van lucht.

**Flow restrictor**  
Regelt de infuussnelheid. Zorg ervoor dat de flowrestrictor in contact blijft met de huid van de patiënt.

**Infusielijn**  
Knikbestendig en bestand tegen compressie.

**Afsluitdop of autostop**  
Voor het afsluiten van de pomp bij langdurige opslag.

**Bevestigingspunt voor draagkoord**



**Patiënten label**  
Voor patiënt- en therapie-identificatie.

**Draagkoord voor om de hals**  
Voor comfortabel dragen van de pomp.

# Meer informatie & contact

**Start compleet**  
Onze zorgvuldig samengestelde pakketten bevatten alle benodigde materialen voor een therapie opstart van 2 weken en zijn geregistreerd bij de Z-Index. De materialen zijn ook los verkrijgbaar in grootverpakking.

**Interesse?**  
Ben je benieuwd wat de Mediq Easyflow® Elastomeerpomp voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op met je accountmanager voor meer informatie.

**Meer informatie?**  
Stuur een e-mail naar [zorgspecialisteninfuus@mediq.com](mailto:zorgspecialisteninfuus@mediq.com) of kijk op onze MedBis pagina voor productspecificaties.

Scan de QR code voor de productspecificaties.



**Scan de QR-code**  
om de inhoud van de startpakketten en de hardcases te bekijken.



**Scan de QR-code**  
voor de instructievideo apotheek.



**Scan de QR-code**  
om onze website te bezoeken.

**easyflow®**  
elastomeerpomp

Exclusief verkrijgbaar bij **MEDIQ**

**Manufactured by Adria Med SRL**  
Via Ignazio Silone 1  
65028 Tocco Da Casauria - Pescara - ITALIA

Phone: +39 085 8886011  
Email: [info.adriamed@numantec.eu](mailto:info.adriamed@numantec.eu)  
Rev. 1.0 – 08.07.2025

CE 0051

**adriamed**  
A NUMANTEC GROUP COMPANY

0624V1