


Monitoring

De Easyflow® heeft een variërende inloopsnelheid, van 30 minuten tot 25 dagen. Hiervoor zijn verschillende modellen beschikbaar.

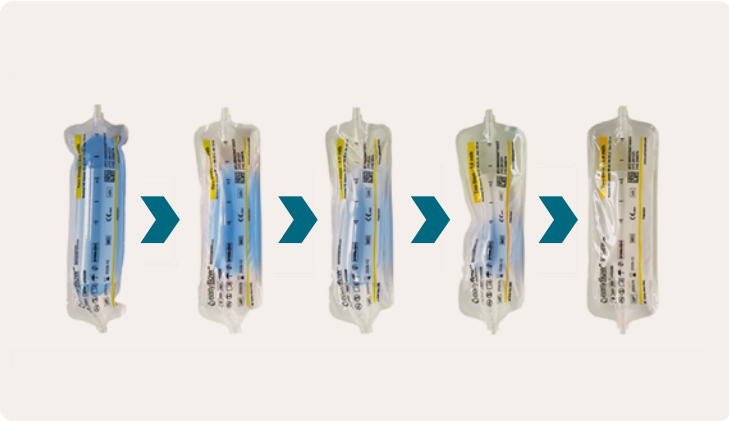


Bij vooral de langzaam werkende pompen is zichtbaar dat het elastomeerreservoir geleidelijk krimpt over meerdere uren of dagen.

- Gebruik de voortgangslijnen op de behuizing van de pomp om het verloop van de infusie te volgen.
- De infusie is voltooid wanneer het reservoir en de pomp volledig zijn leeggelopen en de niveaumarkering dicht bij 0 staat.

Tijd om kamertemperatuur te bereiken (circa +24°C)

	60 ML POMPEN	100 ML POMPEN	300 ML POMPEN	500 ML POMPEN
UREN UIT DE KOELKAST (CIRCA +2 °C TOT +6 °C)	CIRCA 4 UUR	CIRCA 5 UUR	CIRCA 6 UUR	CIRCA 8 UUR
UREN UIT VRIEZER (CIRCA -15 °C)	CIRCA 6 UUR	CIRCA 7 UUR	CIRCA 9 UUR	CIRCA 11 UUR

Factoren die de flow beïnvloeden

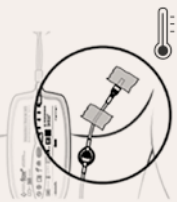

Waarom temperatuur belangrijk is

De temperatuur beïnvloedt de viscositeit van de oplossing in de pomp. Dit kan directe invloed hebben op de infusiesnelheid.

Voor de meest nauwkeurige en stabiele flow:

- Zorg dat de Mediq Easyflow® Elastomeerpomp op kamertemperatuur blijft.
- Bevestig de flow restrictor stevig op de huid voor een constante toediening.
- Zorg voor een stabiele temperatuur tijdens de infusie.



Pomp positie

Optimale inloopsnelheid begint bij juiste positionering. Voor een nauwkeurige en constante infusiesnelheid is het essentieel dat de hoogte van de pomp goed wordt afgestemd op het lichaam: Zorg ervoor dat het ballonreservoir en de luer lock-connector op gelijke hoogte zijn.

Let op:

- Plaats de pomp niet hoger dan de insteekopening van de vaattoegang (dit verhoogt de flow).
- Plaats de pomp niet lager dan het toegangspunt (dit verlaagt de flow).
- Draag de pomp op een manier die comfort en stabiliteit biedt.



Externe druk

Zorg ervoor dat de Mediq Easyflow® Elastomeerpomp geen extra druk van buitenaf krijgt.

Waarom is dit belangrijk?

- Externe druk op de pomp kan leiden tot een afwijkende inloopsnelheid.

easyflow®
elastomeerpomp

Technische Thuiszorg

Easyflow® Elastomeerpomp

MEDIQ at the heart of healthcare



Productbeschrijving

De Mediq Easyflow® Elastomeerpomp is de kleinste, draagbare en lichtgewicht elastomeerpomp voor continue infusie.

Het unieke, volledig zachte ontwerp maakt deze pomp tot de enige in zijn soort op de wereldmarkt, gemaakt van UV-bestendig, DEHP- en latexvrij materiaal, conform ISO 28620 norm voor elastomeerpompen.

Dit zorgt voor een uitzonderlijk hoog niveau van comfort voor de patiënt.

De pomp bestaat uit een elastomeer ballon in een transparante, UV-bestendige zachte behuizing, een infusielijn met capillair buisje als flowrestrictor, en een Luer Lock-connector voor aansluiting op het toegangssysteem van de patiënt.

Zodra de ballon is gevuld, zorgt het elastomeermembraan door middel van positieve druk voor een constante medicijntoediening. De flowrate wordt bepaald door de combinatie van dit membraan en de flowrestrictor.



Exclusief verkrijgbaar bij Mediq

Gepatenteerd en praktisch ontwerp
Draagbaar, licht, veilig en zelfstandig werkend. Ideaal voor gebruik in klinische en thuissituaties.

Gelijkmatige medicatietoediening
Zorgt voor een constante afgifte.

100% individuele kwaliteitscontrole
Voor maximale veiligheid bij elke toepassing.

Innovatieve autostop
Verhoogt de veiligheid en is geschikt voor zelfstandig gebruik.


Eenvoudige duidelijke labeling
Ondersteunt zelfstandig en veilig gebruik.

Ondersteunt de volgende indicaties

- Chemotherapie
- Acute en chronische pijnmanagement
- Antibiotica en antivirale therapy
- Hydratie

Toegangswegen waar de Easyflow® bij gebruikt kan worden
PICC, PAC, CVC, Midline, perifere, subcutaan.

De onderdelen toegelicht

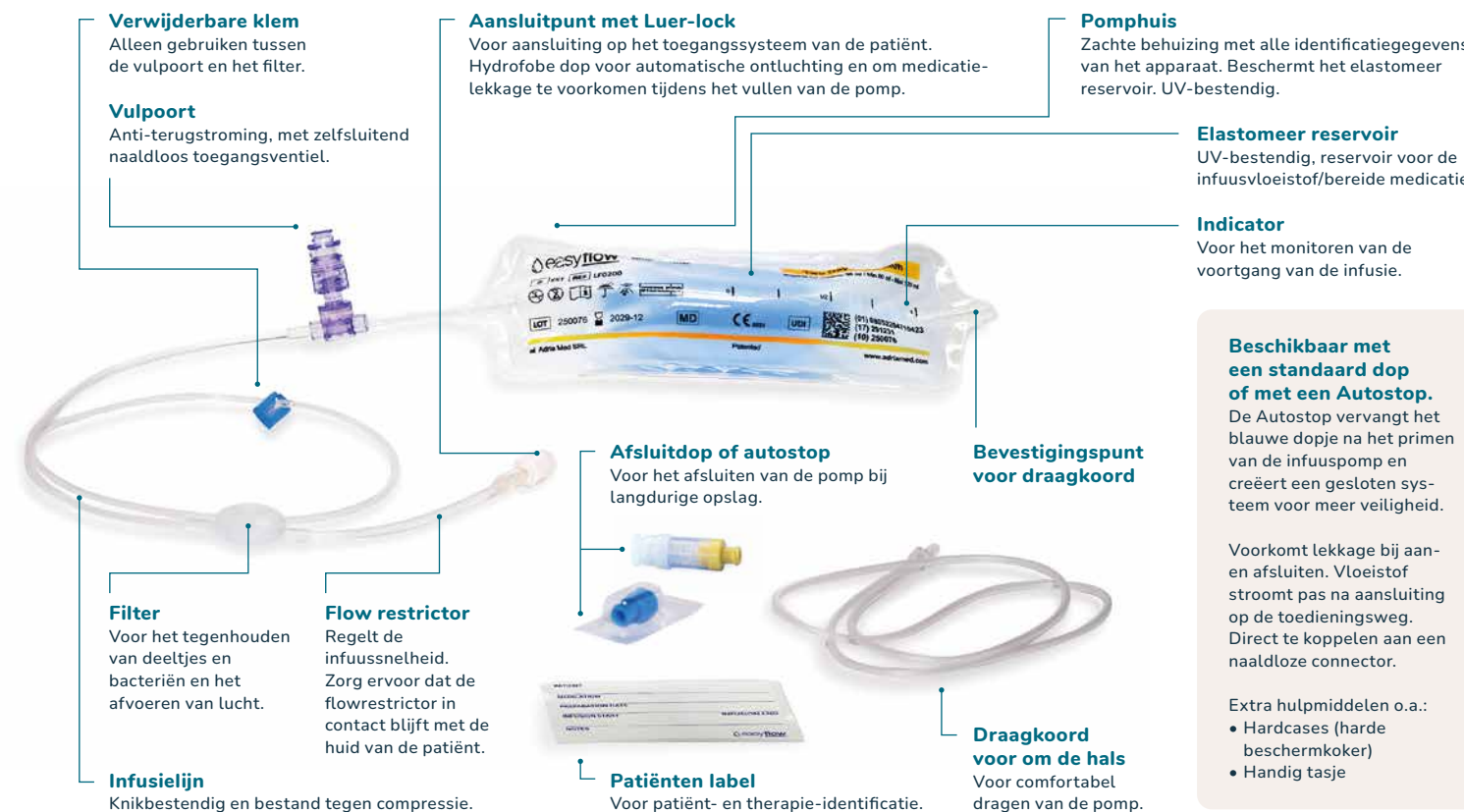

Meer informatie & contact

Start compleet

Onze zorgvuldig samengestelde pakketten bevatten alle benodigde materialen voor een therapie opstart van 2 weken. De startpakketten zijn te bestellen op naam van de patiënt via het voorschrijffortaal van Mediq.

Interesse?

Ben je benieuwd wat de Mediq Easyflow® Elastomeerpomp voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op met je accountmanager voor meer informatie.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar zorgspecialisteninfuus@mediq.com of kijk op onze MedBis pagina voor productspecificaties.

Scan de QR code voor de productspecificaties.



Scan de QR-code om de inhoud van de startpakketten en de hardcases te bekijken.



Scan de QR-code voor de instructie-video apotheek.



Scan de QR-code om onze website te bezoeken.

easyflow®
elastomeerpomp

Exclusief verkrijgbaar bij MEDIQ

0625V1

Manufactured by Adria Med SRL
Via Ignazio Silone 1
65028 Tocco Da Casauria - Pescara - ITALIA

Phone: +39 085 8886011
Email: info.adriamed@numantec.eu
Rev. 1.0 – 08.07.2025

CE 0051

adriamed
A NUMANTEC GROUP COMPANY