

Aansluiten patiënt



- 1.**
Zorg ervoor dat alle materialen binnen handbereik zijn.



- 2.**
Haal de pomp op tijd uit de koelkast zodat deze op kamertemperatuur kan komen.



- 3.**
Controleer de pomp op eventuele beschadigingen, gegevens van de patiënt en de voorgeschreven medicatie.



- 4.**
Pas volgens protocol handhygiëne toe en trek zo nodig handschoenen aan.



- 5.**
Desinfecteer de toegangspoor grondig met een alcoholpad en laat deze 30 seconden drogen.



- 6.**
Verwijder het blauwe dopje/ bescherm dopje van de autostop en zet de blauwe klem open.



- 7.**
Sluit de Easyflow (na eventueel volgens protocol flushen van de toegangspoor) aan op de naadloze connector van de toegangspoor.



- 8.**
Bevestig de flowrestrictor op de huid van de patiënt.



- 9.**
Controleer de aansluiting op eventuele lekkages en observeer de patiënt op mogelijke reacties.



- 10.**
Ruim alle materialen op volgens protocol.



at the heart of healthcare



Scan de QR-code
om de video met
instructies te bekijken.

0628V1