

Verkort stappenplan  
T-34L Standaard  
Spuitspomp



24 uur instelling

**Dit verkorte stappenplan vervangt NIET de fabriekshandleiding die bij de pomp geleverd wordt.**

## Voorladen en plaatsing spuit

### Stap 1

Haal bij een nieuwe spuit altijd de stamper één keer helemaal op- en neer voordat u de spuit vult. Hierdoor loopt de stamper straks soepel. Gebruik uitsluitend BD spuiten!



### Stap 2

Trek de medicatie op en vul de lijn handmatig. Zet daarna de pomp aan via **(on/of)**. De stamperaandrijver loopt dan helemaal terug. Dit kunt u onderbreken door op de rode ronde toets **(stop/no)** te drukken.

### Stap 3

Trek de spuitklem **helemaal naar boven** en draai deze 180 graden. Laat deze **NOOIT** omhoog staan, de pomp kan dan niet verder ingesteld worden.



## Blokkeren van de toetsen

De pomp is nu ingesteld. Door **(info)** ingedrukt te houden blokkeert u de toetsen. Door opnieuw de **(info)** knop in te drukken heft u de toetsenblokkade weer op.

### Disclaimer


*Deze handleiding / stappenplan is met zorg samengesteld. De gebruiksdokumentatie van de fabrikant is echter leidend. Deze handleiding / stappenplan dient uitsluitend ter algemene informatie ten behoeve van het gebruiksgemak. Mediq staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de handleiding / stappenplan. De handleiding / stappenplan is geschreven in beknopte vorm en niet uitputtend. De handleiding / stappenplan kan niet als vervanging van de gebruiksdokumentatie van de fabrikant worden gezien. Door deze handleiding / stappenplan te gebruiken accepteert de gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt en dat alle verantwoordelijkheid, verband houdende met het gebruik van deze handleiding / stappenplan, bij de gebruiker ligt. Behalve indien expliciet anders vermeld, is Mediq niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de effectiviteit van de handleiding / stappenplan, noch van de producten die in de handleiding / stappenplan worden beschreven, noch worden hier garanties op gegeven. Mediq is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met deze handleiding / stappenplan. Alle aansprakelijkheidsuitsluitingen van Mediq gelden ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid kan worden gebaseerd en kunnen mede worden ingeroepen door groepsmaatschappijen van Mediq. Alle juridische relaties waarop deze disclaimer van toepassing is worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht.*



**Stap 9** Controleer of dit juist is.

**Stap 10**  
Bevestig met **(start/Yes)**.

**Stap 11**  
Bevestig met **(start/yes)** als u de infusie wil starten. Na het indrukken begint de pomp te lopen.

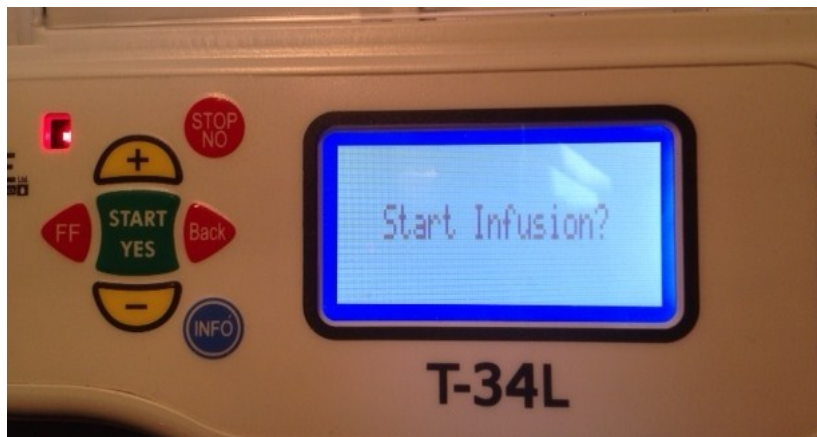

**Stap 4**

Plaatst de spuit losjes in de juiste positie. Spuit nog niet aandrukken!



**Stap 5**

Positioneer de stampaandrijver. Dit doet u met de **(FF)** en **(back)** toets. Precies tussen de openstaande pinnetjes kan nu de spuit in de pomp gedrukt worden.



**Stap 6** Plaats vervolgens de spuitenklem over de spuit heen.



In het scherm wordt het merk (BD) en type (ml) van de spuit weergegeven.



**Stap 7** Controleer of dit juist is.

## De pomp instellen

De pomp wordt geleverd als een 24 uur pomp. Dit betekent dat de pomp zelf de inloopsnelheid bepaald en de spuit in 24 uur leeg loopt.

### Stap 8

Bevestig de juiste spuitkeuze door op **(start/yes)** te drukken.



In het scherm wordt weergegeven hoeveel volume er in de spuit aanwezig is, dat in 24 uur gaat inlopen en geeft de pomp de berekende inloopsnelheid aan.