

Installatie checklist

Autoclaaf Stand Alone

Behorende bij Melag model: Vacuclave 123S. Wij plaatsen uitsluitend een stand-alone autoclaaf, zonder aansluiting op de wateraanvoer en/of waterafvoer. Wij kunnen uw autoclaaf pas installeren als wij deze checklist van u terug hebben ontvangen. Wanneer alle punten akkoord en ingevuld zijn, zien wij alle formulieren graag ondertekend retour. Met het invullen van deze checklist geeft u aan dat de benodigde voorzieningen aanwezig zijn, zodat uw autoclaaf probleemloos geïnstalleerd kan worden.

Werkblad voldoende diep aanwezig?

☐ Ja ☐ Nee

De autoclaaf zal op een hoogte van meer dan 150 cm geplaatst worden:

☐ Ja ☐ Nee

De autoclaaf weegt +/- 60kg en moet daarom op een stevige en stabiele ondergrond staan zoals een tafel of werkblad. E.e.a. ter beoordeling door onze Technische Dienst. Adviesdiepte: minimaal 60cm. **Let op: een klaptafel of bijzettafel voldoet niet.** De afmeting van de autoclaaf is 47x50x64 cm. Rondom heeft de autoclaaf de volgende ruimte nodig in verband met de koeling: rechts: 5 cm, links: 10 cm, achterkant: 10 cm, bovenkant: 5 cm. **U dient er rekening mee te houden, dat de deur van de autoclaaf naar links opendraait.** Wij adviseren u om de autoclaaf op een goede werkhoogte te plaatsen. De plaatsingshoogte moet minimaal 50cm zijn. Als een autoclaaf hoger dan 150 cm geplaatst dient te worden, dan kunt u dit aangeven op het formulier. Plaats de autoclaaf in een goed geventileerde ruimte. Wij raden u af om een autoclaaf in een douche, kast of badkamer te plaatsen. **Let op: de deur van de autoclaaf draait naar links open!**

Stroomvoorziening onbelaste groep aanwezig?

☐ Ja ☐ Nee

Voor de autoclaaf heeft u een **230 Volt stopcontact met randaarde** nodig, die op een onbelaste stroomgroep is aangesloten. De voorkeur gaat uit naar een aparte groep i.v.m. mogelijke overbelasting van de stroomgroep (raadpleeg bij twijfel uw installateur). **Gebruik absoluut geen verlengsnoer.** Stopcontact niet direct achter autoclaaf plaatsen. Houd bij plaatsing van de autoclaaf rekening met de locatie van het stopcontact. Snoerlengte is ± 100 cm.

 Bij een overbelaste groep kan de zekering uitschakelen en de autoclaaf abrupt onderbreken. Hierdoor kan schade ontstaan aan de autoclaaf.

Waar komt de autoclaaf te staan?

☐ Begane grond ☐ Verdieping

Wij ontvangen graag een aantal foto's van de locatie waar de autoclaaf geplaatst dient te worden. De foto's zullen door ons beoordeeld worden, zodat extra kosten achteraf voorkomen kunnen worden.

Uw handtekening: _____

Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar [mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud](https://www.mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud)
Of neem contact met ons op via telefoonnummer **088 888 94 86** of serviceplanning@mediq.com.

