

# Pakketten & Controlepunten

## Pakket A: Basis onderhoud

<b>Audiometers</b>	Controle van de functies en bedieningsknoppen; Controle op kabelbreuk van de responseknop en hoofdtelefoon.
<b>Bloeddrukmeters</b>	Controle m.b.v. gekalibreerd drukmeetinstrument op zeven niveau's: 0, 50, 100, 150, 200, 250 en 300 mmHg; Controle van de manchet en slangen op conditie en lekkage; (Polsbloeddrukmeters vallen buiten de controle).
<b>Broedstoof</b>	Controle van werktemperatuur met behulp van digitale temperatuurmeter en functionele controle. (Alleen mogelijk indien het apparaat in gebruik is in verband met lange opwarmtijd).
<b>Dopplers (handheld)</b>	Functionele controle van probehead, kabel en volumeregelaar en het meten van eventuele lekstroom. ECG apparaat Functionele controle met behulp van een patiëntsimulator.*
<b>HemoCue 201 +glucosemeter</b>	Reinigen van de optische unit met speciale cleaner; Controle m.b.v. glucotrol controle vloeistof op 2 niveaus.
<b>Hemocue 201+ Hb meter</b>	Reinigen van de optische unit met speciale cleaner; Controle m.b.v. hemotrol controle vloeistof op 3 niveaus.
<b>Microscopen</b>	Afstellen en controle van de functies en uitwendig reinigen.
<b>Oorthermometers</b>	Controle mogelijk van de meeste digitale oorthermometers; Controle op 36,0 en 41,0 °C m.b.v. gekalibreerde simulator. (Alle rectaal thermometers zijn uitgesloten van controle)
<b>Overige glucosemeters</b>	Functionele controle van patiëntenmeters m.b.v. de bijgeleverde checkstrip of, indien mogelijk, met een controle vloeistof.
<b>Overige Hb meters</b>	Indien mogelijk reinigen van de optische unit; Controle m.b.v. hemotrol controle vloeistof op drie niveau's.
<b>Saturatiemeters</b>	Visuele controle; Controle op alle functies van het apparaat; Controle m.b.v. gekalibreerde simulator op 3 niveaus en testen van de sensor. Mogelijk op de door Mediq geleverde merken en typen.
<b>Spirometer</b>	Functionele controle met behulp van een gekalibreerde ijkspuit.*
<b>Tympanometer</b>	Functionele controle van de unit en handset; Check met behulp van Micro Test.
<b>Unsters</b>	Controle m.b.v. ijkgewichten op twee niveaus: 2000 en 4000 gram.
<b>Urine analysers</b>	Controle middels een niet-gekoelde teststrip. Mogelijk op de door Mediq geleverde urine analysers.*
<b>Weegschalen</b>	Visuele controle op beschadigingen en zichtbare mechanische defecten; Controle door middel van referentieweegschaal.
<b>Zuurstofapparatuur</b>	Controle zuurstoffles op houdbaarheidsdatum, inhoudvolume, en reduceertoestel; Controle op juist functioneren van de beademingsset.

\*Voor uitgebreide controle van deze producten bieden wij pakket C, meer informatie over dit pakket leveren wij op aanvraag.

## Pakket B: Onderhoud autoclaven

<b>Autoclaven</b>	Zie hiervoor het formulier pakket B: Onderhoud autoclaven.
-------------------	--

De aanpak van Mediq Technische Service is conform de NHG-richtlijnen.

## Pakket C: Onderhoud Quikread Go en Hemocue hb301

<b>Quikread go</b>	Zie hiervoor het formulier pakket C: Onderhoud quikread go (crp) analyzer
<b>Hemocue hb301</b>	Zie hiervoor het formulier pakket C: Onderhoud hemocue hb301 analyzer.

De aanpak van Mediq Technische Service is conform de NHG-richtlijnen.

## Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over onderhoud? Ga dan naar [mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud](https://www.mediq.nl/zorgprofessional/diensten/technisch-onderhoud)  
Of neem contact met ons op via telefoonnummer **088 888 94 86** of [serviceplanning@mediq.com](mailto:serviceplanning@mediq.com).



at the heart of healthcare