

احصل بسهولة على رؤية أوضح طوال الوقت ودعم بجانبك

من خلال مستشعر الجلوكوز الجديد DiaExpert، نقدّم لك الدعم للتعامل مع مرض السكري. هذا المستشعر متاح حصرياً عبر شركة Mediq داخل هولندا. إلى جانب مستشعر DiaExpert، تقدّم مجموعة واسعة من المنتجات والخبرات المتخصصة في مجال العناية بمرضى السكري.

هل لديك أي استفسارات؟

يسعد موظفو خدمة العملاء في Mediq بالرد على استفساراتك خلال أيام العمل الرسمية، وذلك عبر الرقم التالي: من الساعة ٩:٠٠ صباحاً حتى ٥:٠٠ مساءً، عبر الرقم: ٠٨٨ - ٩٤ ٨٨٨

ولمزيد من المعلومات عن مستشعر DiaExpert، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: diaexpert.nl

وستجدون هناك فيديوهات تعليمية أيضاً. يُنصح بالاحتفاظ بهذه الكتيّب لتتمكن من الرجوع إلى التعليمات لاحقاً بسهولة.



الطلب من خلال خدمة Mediq ربع السنوية

تضمن لك خدمة Mediq الربع سنوية توصيل مستلزمات وأدوية السكري في الوقت المناسب بشكل تلقائي، لتتيح لك التركيز على متابعة مرضك. اشترك الآن في خدمة Mediq الربع سنوية بسرعة وسهولة. mediq.nl/kwartaalservice



متوفر حصرياً لدى

DiaExpert
diaexpert.nl

خدمات دعم مستخدمي DIAEXPERT

ما المزايا الخاصة التي تقدمها Mediq حصريًا لمستخدمي DiaExpert؟

نحن هنا من أجلك، بفريق خدمة متكامل مستعد لتقديم الدعم الذي تحتاجه.

فريق الدعم في Mediq يقدم مساعدة عملية في استخدام مستشعر السكر وتطبيق DiaExpert.

برنامج ترحيبي عبر الإنترنت، يقدم مجموعة من النصائح لتمكين من الاستفادة المثلى من مستشعر DiaExpert في أقصر وقت ممكن.

لقاء أسبوعي مفتوح للاستفسارات مع المختص عبر الإنترنت. واستفد كذلك من تجارب واستفسارات مستخدمي DiaExpert الآخرين

استشارة شخصية لمرة واحدة مع إحدى الممرضات المتخصصات في السكري من فريق Mediq لمناقشة استعمال مستشعر DiaExpert.

الفيديوهات التعليمية تتضمن شرحًا مفصلاً خطوة بخطوة.



المستشعر جاهز للاستخدام!

بعد مرور ٦٠ دقيقة من التهيئة، سيبدأ التطبيق في عرض قراءات مستوى السكر. تُحدَّث قراءات السكر تلقائيًا مرة كل دقيقة. لا يلزم استخدام الهاتف لمسح المستشعر يدويًا.

في حال الاستخدام العادي، ينبغي تغيير المستشعر بعد مرور ١٥ يومًا. يعرض لك التطبيق عدد الأيام المتبقية قبل الحاجة إلى استبدال المستشعر.

لمعرفة المزيد عن كيفية استخدام مستشعر DiaExpert للسكري، يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الكامل المتاح في قسم "Downloads" (التنزيلات) على موقعنا الإلكتروني. كما ستجد في قسم "التنزيلات" قائمة الهواتف الذكية التي تدعم الاتصال بمستشعر DiaExpert للسكري.

هل لديك أي استفسارات؟ راجع قسم الأسئلة الشائعة، أو تواصل مع Mediq للحصول على المساعدة. يسرُّ فريق الخدمة لدينا مساعدتك!



الخطوة ٤: ربط المستشعر بتطبيق DiaExpert

١. جل الدخول إلى حسابك على تطبيق DiaExpert.

٢. تأكد من تفعيل البلوتوث في هاتفك المحمول.

٣. اضغط على زر "ربط" الظاهر في الصفحة الرئيسية للتطبيق.

٤. يعرض التطبيق تلقائيًا الأرقام التسلسلية لجميع المستشعرات القريبة من هاتفك. يبدأ الرقم بـ DiaXprt. اختر الرقم التسلسلي الصحيح. وهو الرقم المطبوع على غطاء المستشعر

٥. انتظر حتى يكتمل ربط مستشعر السكر.

دليل تركيب مستشعر السكر DIAEXPERT.



الخطوة ١: تنزيل تطبيق DiaExpert

يمكنك العثور على تطبيق DiaExpert CGM من خلال البحث في Google Play أو App Store.

الخطوة ٢: إنشاء حساب على التطبيق

قم بالتسجيل في DiaExpert باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة مرور خاصة بك.

الخطوة ٣: ضع المستشعر في موضعه

١. اختر موضعاً مناسباً على الجزء الخلفي من أعلى الذراع. تجنب العضلة الموجودة في الجهة الخارجية من أعلى الذراع. عقم الموضع بمنديل كحولي واتركه ليجف تماماً.






٢. المستشعر مدمج مسبقاً في الأداة التي تستخدم لتركيبه. تأكد من أن أداة التركيب في وضع رأسي، بحيث يكون الغطاء في الأعلى.

٣. فك الغطاء من أداة التركيب. تأكد من إزالة القطعة الدائرية المخصصة للتجفيف قبل تركيب المستشعر على ذراعك.

٤. ضع أداة التركيب في المكان المناسب، ثم اضغط على زر التركيب. بمجرد سماع صوت النقر الناتج عن ارتداد الزنبرك، فهذا يعني أن المستشعر غرس بنجاح تحت الجلد.

٥. أزل أداة تركيب المستشعر من ذراعك بحذر. وبهذا يكون المستشعر قد التصق بالجلد وثبت في موضعه.

٦. تأكد في هذه المرحلة من ثبات المستشعر بشكل محكم في مكانه على الجلد. استخدم أصابعك لتسوية حواف المستشعر بلطف.

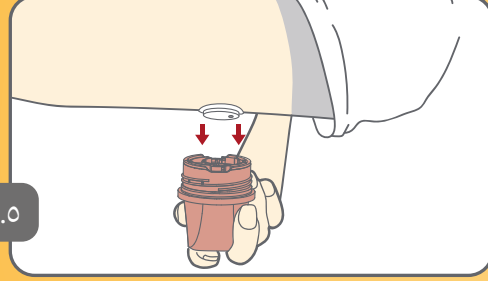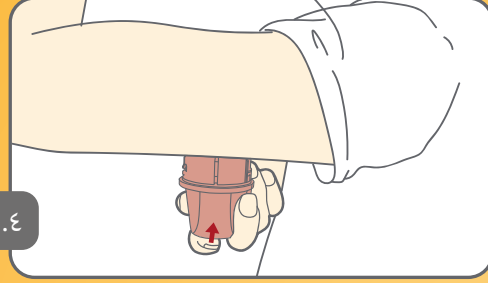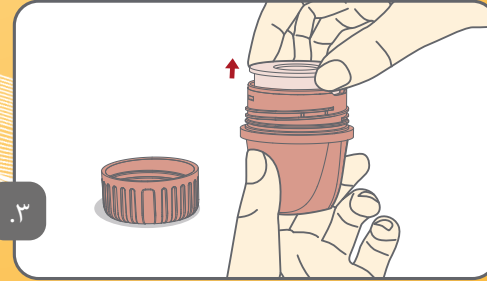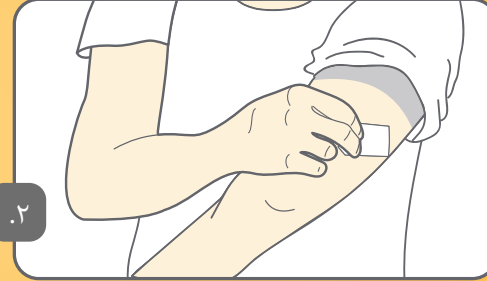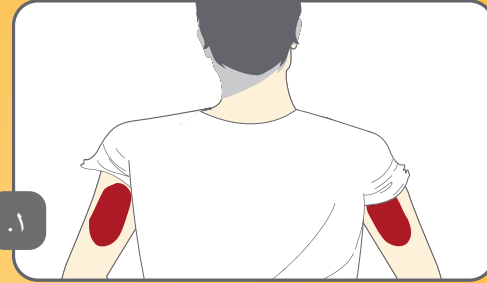

من الأرقام إلى الإدراك

مريح وعملي

يسهل تركيب مستشعر DiaExpert على أعلى الذراع باستخدام الأداة المخصصة المرفقة. المستشعر صغير وخفيف ومريح عند الاستخدام. خلال ٦٠ دقيقة من التشغيل، يصبح المستشعر جاهزاً للعمل!

مع إمكانية الاستخدام لمدة ١٥ يوماً كاملة لكل مستشعر، تقل الحاجة للتبديل وتحافظ على الاتصال المستمر بالبيانات في التطبيق.

الدعم متوفر وقت الحاجة

باستخدام دليل البدء الواضح، يمكنك ربط المستشعر بتطبيق هاتفك المحمول أو أي جهاز استقبال آخر. يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام. لا بأس إن لم تنجح المحاولة من المرة الأولى. فريق خدمة العملاء في Mediq جاهز دائماً لتقديم المشورة والنصائح.



إدراك وضعك الصحي

DiaExpert تقدم حلولاً لمرضى السكري. مع مستشعر DiaExpert للسكري، نساعدك على تحويل الأرقام المجردة إلى معرفة عملية، فتختار بسهولة ما يناسبك.

- رصد مستمر لمعدل السكر في الدم طوال اليوم
- التطبيق ينبهك فوراً عند حدوث تغيرات جوهرية.
- تتابع تأثير الغذاء والنشاط البدني والأدوية على معدل السكر في الدم.
- شارك بياناتك المسجلة في التطبيق مع الطبيب والعائلة، ليتمكنوا من العمل سوياً على اتخاذ التدابير المطلوبة.

مستشعر يمكنك الثقة به



- مقاوم للماء لمدة تصل إلى ساعة وعمق مترين
- جدير بالثقة ودقيق
- تنبيهات مخصصة حسب الحاجة
- يستخدم لمدة تصل إلى ١٥ يوماً متواصلة
- صغير وخفيف
- قراءة كل دقيقة
- قراءات أوتوماتيكية، بلا مسح
- بدون حاجة للمعايرة، مع إمكانية القيام بها

عملي: اللون يدل على الحالة

تعرف من التطبيق بلمحة واحدة إن كان مستوى السكر في دمك مرتفعاً أم منخفضاً أم طبيعياً، حيث إن ألوان الشاشة تتغير حسب مستوى السكر في دمك، مما يمكنك من الاستجابة للتغيرات بسرعة ووعي أكبر.



دليل التشغيل

مستشعر الجلوكوز DiaExpert

احصل بسهولة على رؤية أوضح
طوال الوقت ودعم بجانبك



MEDIQ متوفر حصرياً لدى

DiaExpert
diaexpert.nl