



AllStar® PRO instructies

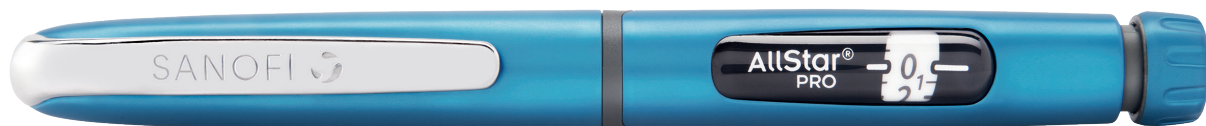


In deze handleiding vindt u de voornaamste gegevens over de AllStar® PRO. Raadpleeg de volledige informatie in de bijsluiter, voordat u de pen voor de eerste keer gebruikt en bij problemen of detailvragen.

Uw pen leren kennen

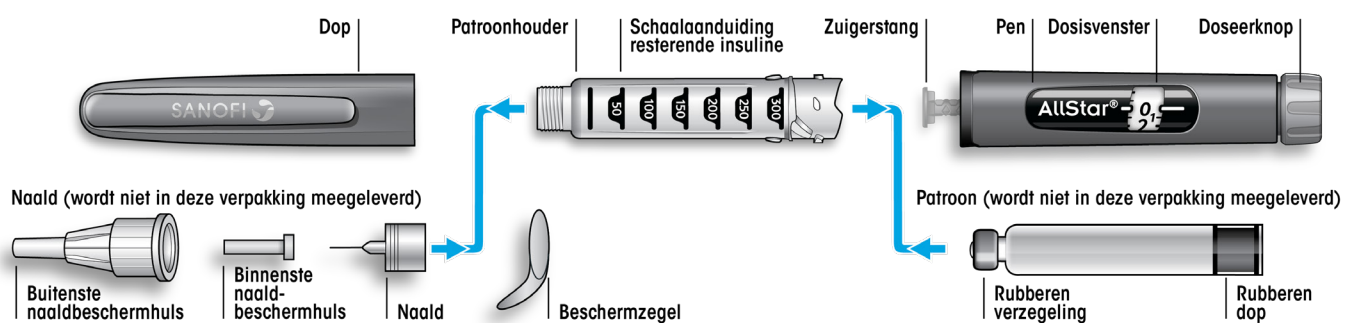

STAP 1 - PLAATS EEN NIEUW PATROON



- A** Trek de dop van de AllStar® PRO.
- B** Schroef de patroonhouder los van de pen. Moet er een insulinepatroon worden vervangen, haal het oude patroon dan uit de patroonhouder en gooi deze weg.
- C** Controleer het etiket van uw nieuwe insulinepatroon op de soort insuline en de uiterste houdbaarheidsdatum.
- D** Plaats het nieuwe patroon, met de smalle kant eerst, in de patroonhouder.
- E** Schuif de patroonhouder recht in de pen en gebruik de rubberen dop van het patroon om de zuigerstang terug te duwen. Druk de doseerknop niet in terwijl u de zuigerstang in de pen duwt.
- F** Draai de patroonhouder vast op de pen totdat deze vastklikt.
- G** Zorg ervoor dat de aansluitmarkeringen op de patroonhouder en de pen op elkaar aansluiten, zoals aangegeven. Als de markeringen niet op elkaar aansluiten, draai dan de patroonhouder los en probeer het nog eens.

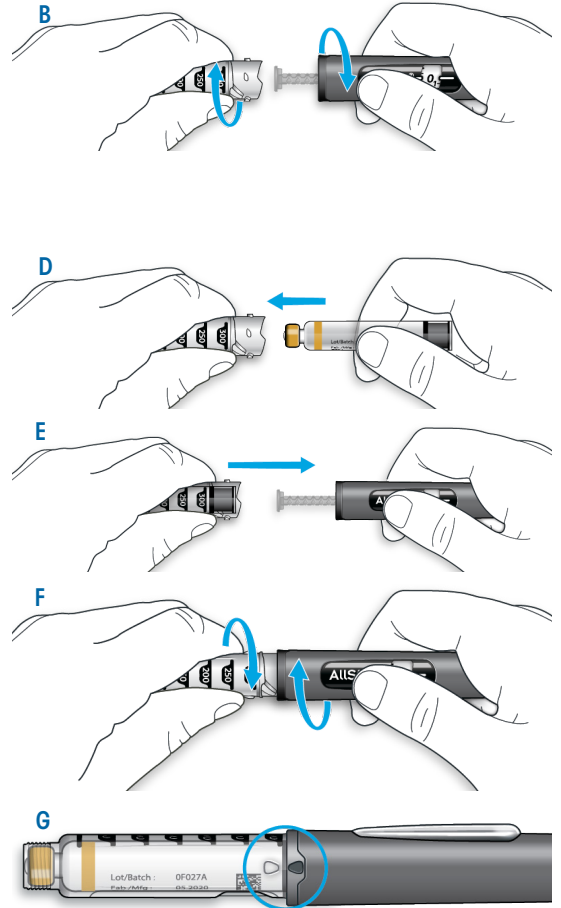

STAP 2 - CONTROLEER UW INSULINE


- A** Trek de dop van de AllStar® PRO.
- B** Controleer het etiket van uw insulinepatroon op de soort insuline en de uiterste houdbaarheidsdatum.
- C** Controleer hoe uw insuline er uitziet vóór iedere injectie:

- A.** Als u heldere insuline gebruikt (bijv. Lantus®, Apidra®, Insuman® Rapid): gebruik het patroon niet als de insuline troebel of verkleurd is, of vaste deeltjes bevat.
- B.** Als u een insulinesuspensie gebruikt (bijv. Insuman® Basal of Insuman Comb) zwenk de pen minstens 10 keer op en neer om de insuline te mengen. Zwenk de pen voorzichtig om schuimvorming in het patroon te voorkomen. Controleer na het mengen hoe uw insuline eruitziet. Insulinesuspensies zijn gelijkmatig melkwit van kleur.

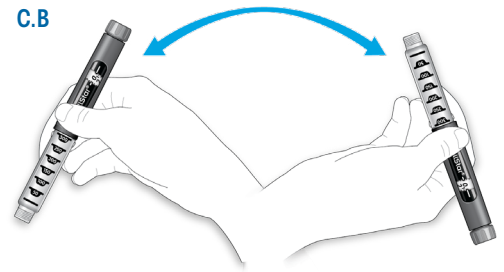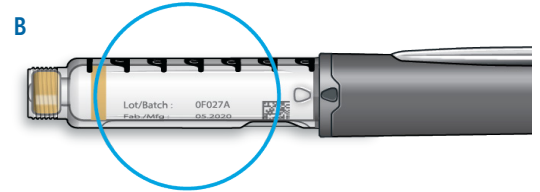

STAP 3 - BEVESTIG DE NAALD


- A** Neem een nieuwe naald en verwijder de beschermfolie.
- B** Houd de naald recht en schroef deze op de pen tot de naald vastzit. De naald niet té stevig vastdraaien.
- C** Verwijder de buitenste naalddop. Bewaar deze voor later.
- D** Verwijder de binnenste naalddop en gooi deze weg.

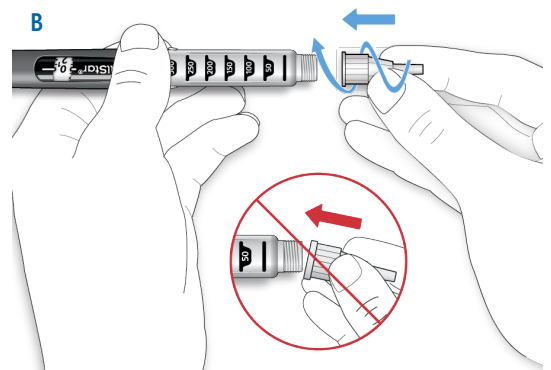

STAP 4 - VOER EEN VEILIGHEIDSTEST UIT

- A** Stel een dosis van 2 eenheden in door aan de doseerknop te draaien tot het cijfer 2 op gelijke hoogte staat met de dosiswijzer.
- B** Druk de doseerknop volledig in. Wanneer er insuline uit de naaldpunt komt, functioneert de pen op de juiste wijze. Als er geen insuline uit komt:
- A.** Mogelijk moet u deze stap tot maximaal 3 keer herhalen voordat er insuline zichtbaar is.
 - B.** Als er na de derde poging nog geen insuline uitkomt, kan de naald verstopt zijn. Als dit gebeurt:
 1. vervang de naald (zie stap 7 en stap 3)
 2. controleer of het patroon correct is geplaatst, niet leeg is en niet is beschadigd
 3. herhaal de veiligheidstest (stap 4)

Als u luchtbelletjes ziet, dit is normaal, u zult er geen last van ondervinden.

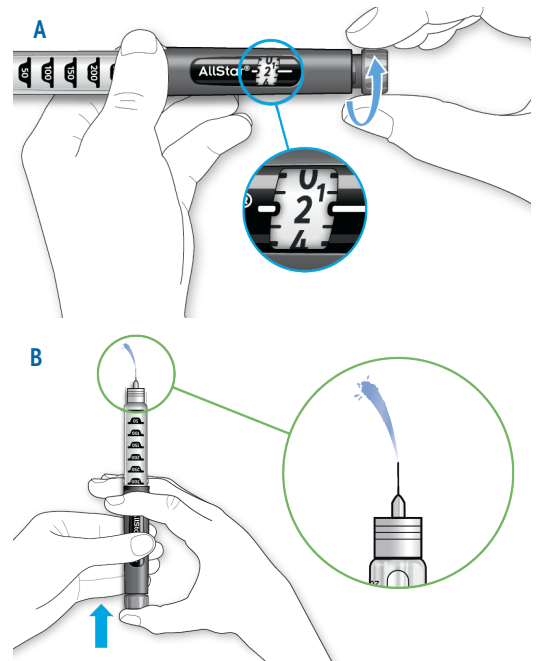


STAP 5 - SELECTEER DE DOSIS

- A** Zorg ervoor dat een naald bevestigd is en dat de dosis op "0" staat.
- B** Draai aan de doseerknop totdat uw dosis verschijnt tussen de dosiswijzer:
- A.** Als u voorbij uw dosis draait, kunt u terugdraaien.
 - B.** Als de pen minder eenheden bevat dan u nodig heeft, dan stopt de doseerknop op het aantal eenheden dat nog in de pen zit.
 - C.** Als u niet uw volledige voorgeschreven dosis kunt instellen, dan kunt u:
 1. de resterende insuline in het patroon injecteren (stap 6-7), daarna het patroon vervangen door een nieuwe (stap 1) en uw dosis aanvullen (stap 2-7).
 2. of het oude patroon met het restant weggooien en een nieuw patroon gebruiken voor uw volledige dosis (stap 1-7).




STAP 6 - INJECTEER DE DOSIS

- A** Gebruik de injectietechniek zoals uitgelegd door uw zorgverlener.
- B** Steek de naald in de huid zoals uw zorgverlener heeft getoond, raak de doseerknop nog niet aan.
- C** Plaats uw duim op de doseerknop. Druk de knop langzaam helemaal in en houd vast.
- D** Houd de doseerknop helemaal ingedrukt. Als u "0" in het dosisvenster ziet, tel dan langzaam tot 10.
- E** Na het indrukken en langzaam tot 10 tellen, kunt u de doseerknop loslaten. Haal dan de naald uit uw huid.

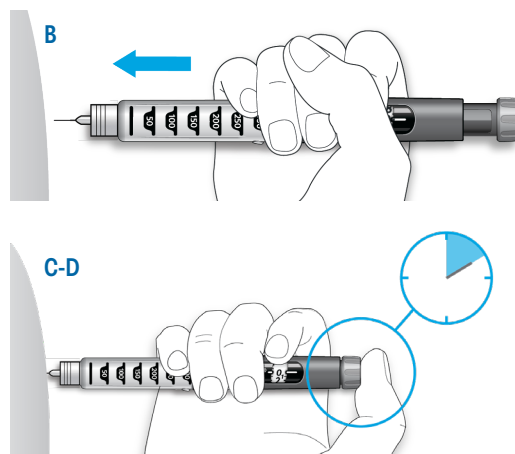


STAP 7 - VERWIJDER DE NAALD

- A** Houd de buitenste naalddop bij het breedste gedeelte vast. Houd de naald recht en plaats de buitenste naalddop over de naald op de pen. Duw de naalddop stevig vast.
- B** Houd het breedste gedeelte van de buitenste naalddop stevig vast. Draai de pen een aantal keren met uw andere hand om zo de naald los te schroeven.
- C** Gooi de gebruikte naald weg in een naald-container (of zoals uw zorgverlener heeft getoond).
- D** Doe de dop terug op de pen.

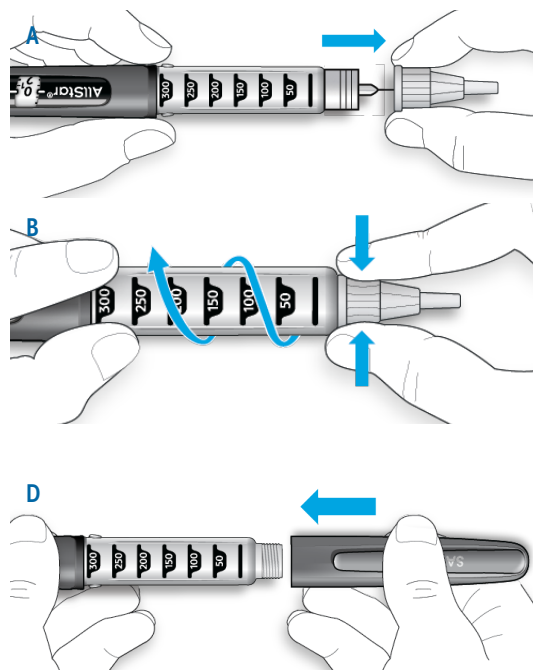


Ieder insulinepatroon kan worden gebruikt voor meerdere injecties. Bewaar uw AllStar[®] PRO met de insulinepatroon in de pen, klaar voor uw volgende injectie. Bewaar de pen niet in de koelkast.

1 BEVESTIGEN VAN DE NAALD

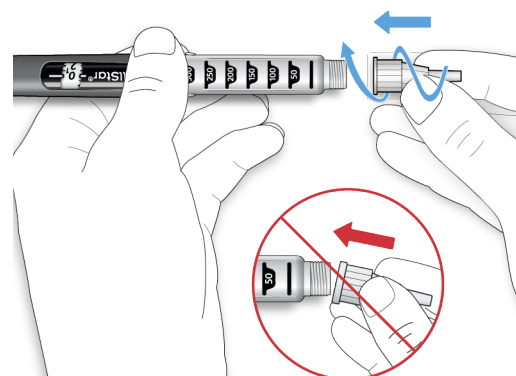


2 VEILIGHEIDSTEST

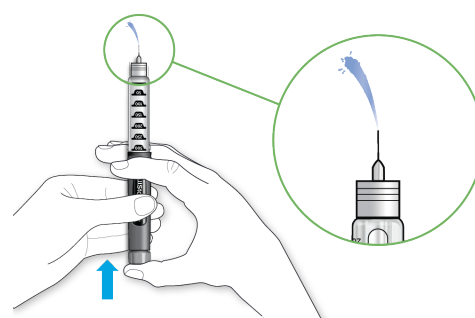

3 INSTELLEN VAN DE INSULINEDOSIS



4 INJECTEREN VAN DE INSULINEDOSIS

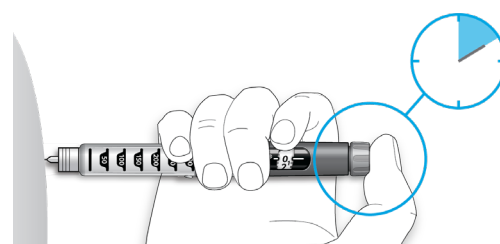

5 VERWIJDEREN VAN DE NAALD

