

## Gewoon duidelijk



### Teststrip invoeren

Neem een Accu-Chek® Performa teststrip uit de flacon en sluit de flacon. Voer de teststrip in de meter. De meter gaat automatisch aan.



### Display vermeldingen

In de display verschijnt het teststripsymbool en een knipperend bloeddruppelsymbool.




### Bloed aanbrengen

Houd de bloeddruppel tegen de uitsparing aan de voorkant van het gele testveld van de teststrip. Zodra de meter piept, is er voldoende bloed opgezogen door de teststrip.



### Resultaat aflezen

Binnen 5 seconden verschijnt het resultaat. Indien gewenst kan nu een markering meegegeven worden aan het resultaat. Verwijder hierna de teststrip uit de meter. De meter gaat automatisch uit.

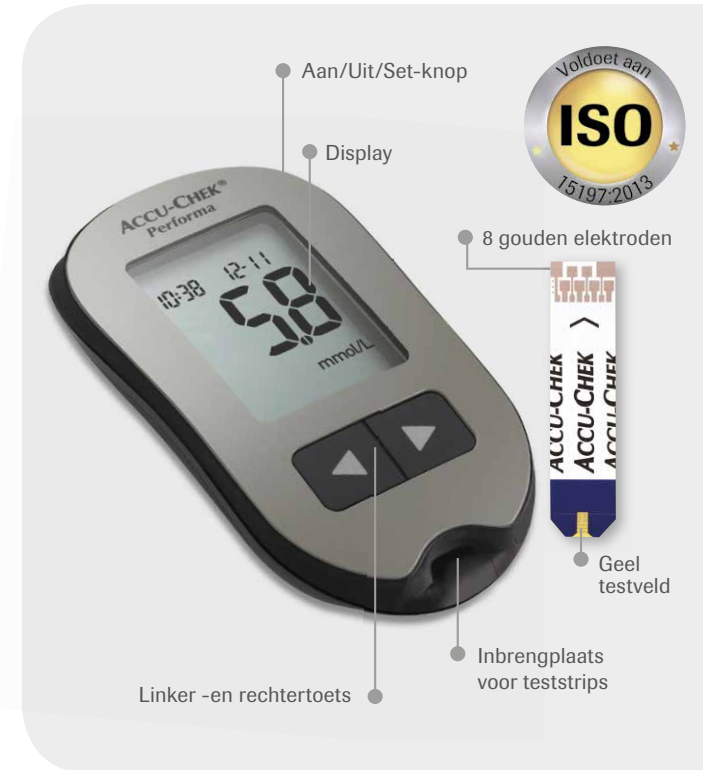

### Meer details?

Raadpleeg de Accu-Chek® Performa handleiding

## Wel een druppeltje bloed, geen venijnige pijn



### 1 Prikdiepte instellen

Met behulp van de voorste dop stelt u de prikdiepte op uw persoonlijke huiddikte in.



### 2 Dop eraf halen

Haal de dop van de prikpen om het lancet te plaatsen.



### 3 Lancet plaatsen

Plaats het lancet tot deze duidelijk vastklikt. Draai daarna het beschermkapje van het lancet en plaats het dopje terug op de prikpen.



### 4 Prikpen aanspannen

De ontspanknop is nu geel gekleurd.



### 5 Bloed prikken

Zet de prikpen tegen uw vinger en druk op de gele ontspanknop.



### 6 Lancet uitwerpen

Haal de voorste dop van de prikpen. Door het uitwerpmechanisme naar voren te schuiven valt het gebruikte lancet eruit.



## Ontdek wat mogelijk is.

Ga voor meer informatie naar [www.accu-chek.nl](http://www.accu-chek.nl) of bel 0800 - 022 05 85 (gratis).

