

Eenvoudige Diabeteszorg: Minder werk en minder zorgen met CareSens®Dual

Bediening in één enkele stap

- Geen codering nodig

Gebruik voor het meten van B-ketonen de KetoSens strip. Maak voor het meten van glucose gebruik van de CareSens PRO teststrips. De CareSens Dual herkent het type teststrip automatisch.




- 1 Voer de Glucose/KetoSens teststrip in
- 2 Voeg de bloeddruuppel toe
- 3 Glucosewaarde in 5 seconden of B-ketonenwaarde in 8 seconden

Verbeterde meetprestaties

- Geavanceerde accurateid
 - 99,7% van de resultaten binnen 15 mg/dL (0,83 mmol/L) ofwel binnen 15% van de referentie waarden. Hiermee voldoet deze aan de criteria van ISO 15197:2013.
- Brede Hematocriet-range
 - 15-65%
- Verschillende bloedmonsters
 - capillair en veneus volbloed
- Meet ketonen op dezelfde meter
 - individueel, in folie verpakte, ketonen-teststrips

Ergonomisch ontwerp

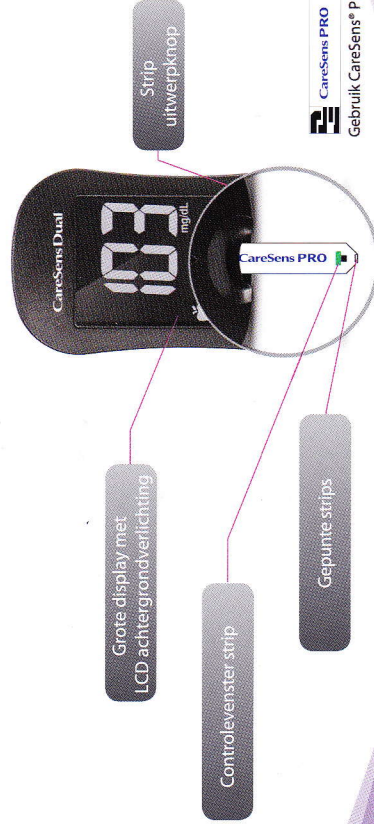

KetoSens
CareSens PRO / KetoSens® Test Strips
Gebruik CareSens® PRO / KetoSens® Test Strips

www.zkopehealthcare.com

Zkope HealthCare

géén interferentie door zuurstof

CareSens®Dual

Bloed β-ketonen meter + Bloed Glucose meter



*Ware grootte



Specificaties

- 0,4 µL/5 seconden
- 1,1-33,3 mmol/L (20-600 mg/dL)
- Hematocriet: 15-65%
- geheugen voor 1000 testresultaten
- 5-45 °C
- vers capillair/veneus volbloed

voor β-ketonen

- 0,5 µL/8 seconden
- 0,1-8,0 mmol/L
- Hematocriet: 30-60%
- 15-30 °C

Kenmerken

- Enzym: GDH-FAD
- Geen codering nodig
- Hypo-/Hyperglykemie aanduiding
- Aanduiding strip vervaldatum
- Uitwerpknop strip
- LCD achtergrondverlichting
- 1,7,14,30, 90- testdagen gemiddelde
- nuchter, voor- en na maaltijd markering
- 4 waarschuwingen instelbaar
- 2 uur na de maaltijd
- Ketonen test alarm
- Bluetooth® SMART (Optie)
- Data poort