



Uw CONTOUR®NEXT Meter



Uw CONTOUR®NEXT teststrip

VOORZICHTIG: Gebruik alleen Bayers CONTOUR NEXT teststrips met uw CONTOUR NEXT meter.

De meter aan- en uitzetten

- Houd de **OK**-knop ingedrukt **totdat uw meter aan- of uitgaat.**
- Wanneer een teststrip in de teststrippoort van de meter wordt gestoken, gaat de meter aan.

Knoppen voor omhoog/omlaag/OK

- Met de ▲- of ▼-scrollknoppen kunt u één voor één waarden of opties wijzigen. Om te scrollen houdt u de ▲- of ▼-knop ingedrukt.
- Druk op de **OK**-knop om de gemarkeerde optie te selecteren.
- Wanneer u het Logboek of Trends wilt verlaten en terug wilt keren naar het Hoofdmenu, drukt u op de **OK**-knop.
- Om Instellingen te verlaten en terug te keren naar het Hoofdmenu scrollt u omlaag naar het **Hoofdmenu** en drukt u op de **OK**-knop.

Zorg ervoor dat u de CONTOUR®NEXT handleiding en de MICROLET®2 bijsluiter leest voor volledige instructies. Bestemd voor in vitro diagnostisch gebruik.

Begininstelling van uw meter

Voordat u uw eerste bloedglucosetest uitvoert, moet u uw meter instellen.



1. Houd de **OK**-knop ingedrukt totdat de meter aanslaat.



2. Druk zonnodig op de ▼-knop om de gewenste taal te markeren. Scroll omlaag om meer talen te zien. Druk op de **OK**-knop om uw keuze te bevestigen.

Dit schermvoorbeeld toont de talen die kunnen worden gekozen. De volgorde van de talen kan per land verschillen.



3. Er verschijnt een bericht op uw scherm ter bevestiging van uw taal.

4. Druk op de **OK**-knop om de instelling te voltooien. Uw meter is nu klaar om uw bloedglucosewaarde te testen.

U kunt ook uw taal, de tijd en de datum wijzigen door naar het **Hoofdmenu** te gaan en **Instellingen** te kiezen. Voor instructies kunt u de handleiding raadplegen.

Potentieel biorisico

Alle bloedglucosemeters worden beschouwd als biologisch gevaarlijk. Professionele zorgverleners of personen die dit systeem bij verschillende patiënten gebruiken, moeten de infectiecontroleprocedure volgen die is goedgekeurd door hun instelling. Alle producten of voorwerpen die in aanraking komen met menselijk bloed moeten, zelfs na reiniging, worden behandeld als mogelijke overbrengers van virale ziekten. Voorafgaand aan reparatie of onderzoek moet de gebruiker de aanbevelingen volgen voor de preventie van door contact met bloed overdraagbare ziekten in de gezondheidszorg. Voor volledige instructies kunt u uw handleiding raadplegen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bayerdiabetes.nl of het gratis nummer van de Bayer Diabetes Klantenservice bellen: 0800 235 22937

Uw bloedglucosewaarde meten – Vingertop

⚠ WAARSCHUWING

Was uw handen voor en na het meten bij het gebruik van de meter, het prikapparaat of de teststrips altijd goed met water en zeep en droog ze goed af.



1. Verwijder de punctiedop van het MICROLET[®]2 prikapparaat.



2. Maak de ronde beschermdop van een lancet los door deze ¼ slag te draaien, maar verwijder deze dop niet.



3. Steek het lancet stevig in het prikapparaat totdat deze niet meer verder kan.



4. Draai de ronde lancetbeschermdop eraf.



5. Plaats de grijze punctiedop terug.



6. Stel de prikdiepte in door aan de punctiedop te draaien totdat de gewenste prikdiepte wordt aangegeven.



7. Steek het vierkante, grijze uiteinde van de teststrip in de teststrippoort om de meter aan te zetten.

De meter, gaat aan en op het scherm verschijnt **Bloed aanbrengen**. De meter is nu klaar voor het testen.



8. Druk de punctiedop stevig tegen de prikplaats en druk met uw duim op de blauwe vrijgaveknop.

Strijk met uw andere hand naar de prikplaats toe zodat er een druppel bloed wordt gevormd.



9. Breng direct hierna de tip van de teststrip in contact met de druppel bloed.

Als de eerste druppel bloed niet genoeg is, zal de meter twee keer een pieptoon geven. U hebt ongeveer 30 seconden om meer bloed op dezelfde strip aan te brengen. Volg de instructies op het meterscherm.



10. Het scherm AutoLog* verschijnt. Selecteer **Nuchter, Voor Eten, Na Eten of Geen Markering**, en druk dan op de **OK**-knop.

Als uw resultaat hoger of lager dan uw ingestelde doelwaarden is, zult u altijd uw resultaat zien zonder op een knop te drukken.



Nadat u uw keuze hebt gemaakt verschijnt op het scherm uw testresultaat. Uw test is nu voltooid en uw testresultaat is vastgelegd.

Als uw testresultaat buiten uw doelwaarden valt, zult u uw resultaat zien met een opmerking en zult u niet het scherm AutoLog zien.

11. Om Opties te zien voor het instellen van een herinnering of het toevoegen van een opmerking drukt u op de **OK**-knop voordat u de teststrip verwijdert.

Raadpleeg de handleiding voor instructies voor het gebruik van Opties. Om uw meter uit te zetten dient u de teststrip te verwijderen.

* Uw meter wordt standaard geleverd met AutoLog ingeschakeld. Raadpleeg uw handleiding voor informatie over de AutoLog-optie. Uw meter is vooraf ingesteld en geblokkeerd zodat resultaten in mmol/L worden getoond. Als uw resultaat in mg/dL staat weergegeven, neem dan contact op met de Bayer Diabetes Klantenservice: 0800 235 22937.

VOORZICHTIG:

- Het MICROLET[®]2-apparaat is niet geschikt voor gebruik door professionele zorgverleners. Het mag maar bij één persoon worden gebruikt vanwege het risico op infectie.
- Om het lancet uit het prikapparaat te verwijderen, zie de MICROLET[®]2 bijsluiters of de CONTOUR[®]NEXT handleiding.

Het scherm van het Hoofdmenu

1. **Logboek** zal worden gemarkeerd. Als u uw Logboek wilt inzien, druk dan op de **OK**-knop.



2. Om al uw gemiddelden en samenvattingen te bekijken drukt u op de **▼**-knop om **Trends** te markeren en drukt u vervolgens op de **OK**-knop.

3. Om meterinstellingen te wijzigen of bij te stellen markeert u **Instellingen** en drukt u op de **OK**-knop.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bayerdiabetes.nl of het gratis nummer van de Bayer Diabetes Klantenservice bellen: 0800 235 22937.



Bayer HealthCare

Gedistribueerd door:

Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT MIJDRECHT
NEDERLAND

Tel. 0800 235 22937
www.bayerdiabetes.nl
info@bayerdiabetes.nl

Bayer, het Bayer Kruis, CONTOUR, MICROLET en het No Coding-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bayer.



Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland

© 2012 Bayer. Alle rechten voorbehouden.

Bayer



84481956
Rev. 08/12