






Foutcodes en symbolen:

| WAT U ZIET | WAT HET BETEKENT | WAT U MOET DOEN |
|---|---|--|
|  | Batterij is bijna leeg – wanneer het batterijsymbool tijdens het testen op het scherm blijft staan. | Vervang de batterij zo snel mogelijk. |
|  | Temperatuur te hoog of te laag. | Ga naar een plaats die zich binnen het werkingsbereik voor de meter bevindt: 5–45 °C. Geef het apparaat en de teststrips twintig minuten de tijd om zich aan de temperatuur aan te passen voor u gaat testen. |
|  | De teststrip is niet genoeg gevuld om een nauwkeurig resultaat te geven. | Verwijder de teststrip en herhaal de test met een nieuwe teststrip. |

Raadpleeg de handleiding voor volledige instructies, waaronder probleemoplossing en informatie over fouten

| WAT U ZIET | WAT HET BETEKENT | WAT U MOET DOEN |
|---|--|--|
|  | De meter detecteert een gebruikte teststrip. | Haal de teststrip uit de meter en test opnieuw met een nieuwe teststrip. Wacht tot u de knipperende bloeddruppel op het scherm ziet voordat u het bloedmonster toevoegt. |
|  | Teststrip niet goed ingestoken. | Verwijder de teststrip en steek hem er op de juiste wijze in. |
| E5 E6 E8 E9 | E10 E11 E12 E13 | Mogelijk software- of hardwareprobleem. |
| | | Haal de teststrip uit de meter en test opnieuw met een nieuwe teststrip. Als u problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met de klantenservice. |

| WAT U ZIET | WAT HET BETEKENT | WAT U MOET DOEN |
|---|---|--|
|  | Verkeerde teststrip. | Haal de teststrip uit de meter en test opnieuw met een CONTOUR TS-teststrip. |
|  | Testresultaat is "HI" (Hoog; hoger dan 33,3 mmol/l) | <ul style="list-style-type: none"> Was uw handen en de prikplaats. Herhaal de test met een nieuwe teststrip. Als uw resultaat nog steeds "HI" (Hoog) of "LO" (Laag) is, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of medische zorgverlener. |
|  | Testresultaat is "LO" (Laag; lager dan 0,6 mmol/l). | |
| <p>WAARSCHUWING: Glucoseniveaus boven 13,9 mmol/l of onder 2,8 mmol/l kunnen een mogelijk ernstige medische toestand aangeven.</p> | | |

Gedistribueerd door:
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT MIJDRECHT
NEDERLAND
Tel: 0800 235 22937
www.diabetes.bayer.nl

Bayer

© 2014 Bayer
84265136 Rev. 08/14



Contour[®] TS

BLOEDGLUCOSEMETER



KORTE HANDLEIDING



Lees uw handleiding en de bijsluiter van het prikapparaat voor volledige instructies voordat u een bloedglucosetest uitvoert.



0088




Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland



Bayer HealthCare

Bayer, het Bayer Kruis, CONTOUR, MICROLET en het No Coding-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bayer.

Uw CONTOUR®TS-meter:

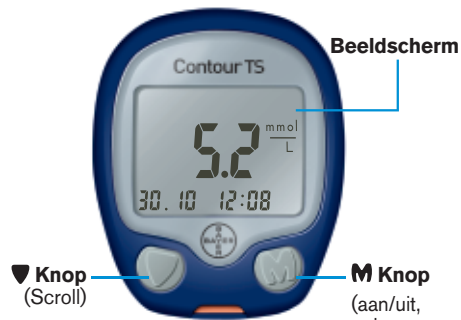

▼ Knop
(Scroll)

M Knop
(aan/uit,
geheugen
oproepen,
instellingen)

Oranje
teststrippoort

Uw CONTOUR®TS- teststrip:

Monstertip: Het uiteinde van de teststrip waar het bloed wordt opgezogen.

Grijs, vierkant uiteinde: Dit uiteinde steekt u (met het grijze uiteinde naar boven) in de oranje teststrippoort van de meter.




- Was uw handen altijd goed met water en zeep vóór en na het testen en vóór en na het hanteren van de meter, het prikapparaat of de teststrips.
- Het MICROLET®2-prikapparaat is bedoeld voor zelftests door één patiënt. Vanwege het infectiegevaar mag het niet bij meer dan één persoon worden gebruikt.

Plaatsen van de teststrip:

Verwijder een teststrip uit de flacon en doe het deksel stevig dicht. Bewaar de teststrips nooit buiten de flacon!

Houd de teststrip vast met het grijze uiteinde naar boven en steek hem in de oranje teststrippoort. *Er is geen codering nodig!*

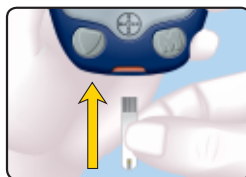

Een teststrip met een knipperende bloeddruuppel wordt zichtbaar om u te laten weten dat de meter klaar is voor de test.




Verkrijgen van de bloeddruuppel:

Druk het prikapparaat stevig op de prikplaats en druk op de vrijgaveknop.




Test onmiddellijk nadat zich een bloeddruuppel heeft gevormd. Er is slechts 0,6 µl nodig voor een test.

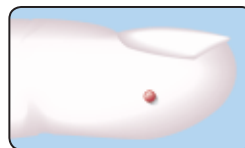


Aanbevolen echte druppelgrootte

Uw bloed testen:


Houd de meter met de oranje teststrippoort naar beneden of naar u toe. Raak de bloeddruuppel onmiddellijk met de tip van de teststrip aan. Het bloed wordt via de tip van de teststrip opgezogen.

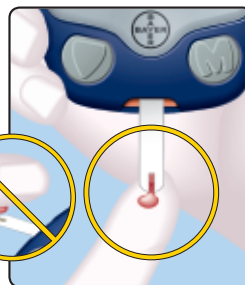

Houd de tip van de teststrip in de bloeddruuppel totdat de meter een piepsignaal geeft en het aftellen van 5 seconden begint.

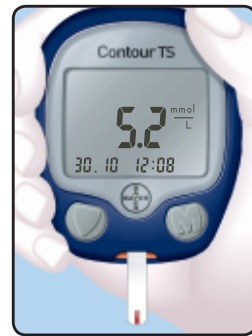

Verwijder de teststrip om de meter uit te schakelen. Voer de gebruikte teststrip op voorzichtige wijze af.

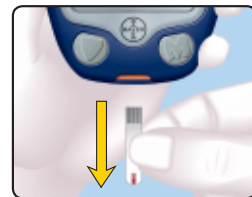

Hebt u hulp nodig? Bel: 0800 235 22937 of ga naar: www.diabetes.bayer.nl